

Le set **ReseCare** comprend les éléments suivants :

Set **Passif**
Ref. D400 100 011

ou

Set **Actif**
Ref. D400 100 013

Hystéroscope HD, 2,9mm, 12°
Autoclavable. L:300mm
Réf. D300 100 004




Chemise externe 18,5Fr.
Double flux. Encliquetage rapide
Réf. D300 130 000




Chemise interne 17,5Fr.
Rotative
Réf. D300 130 001




Élément de travail à action passive
Compatible avec les énergies bipolaires et monopolaires
Réf. D300 130 002

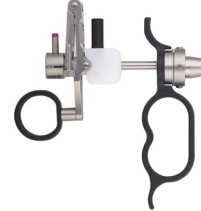

Élément de travail à action active
Compatible avec les énergies bipolaires et monopolaires
Réf. D300 130 009

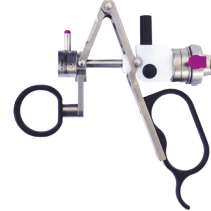

Electrode coupante 30°
Réf. D300 140 000

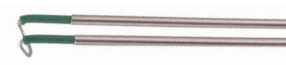

Electrode coupante droite
Réf. D300 140 001



Electrode rouleau
Réf. D300 140 003



Electrode couteau
Réf. D300 140 002



Câble de lumière
Autoclavable. Ø:3,5mm. L:2,3m. Fourni avec embouts Storz
Réf. D200 150 500



Accessoires optionnels :


Obturateur
Encliquetage rapide
Réf. D300 130 003



Tube de stérilisation
Autoclavage et stockage des électrodes
Réf. D200 160 003



Panier de stérilisation
Autoclavable. 480x250x47mm. Fourni avec un tapis en silicone et un couvercle
Réf. D200 160 500

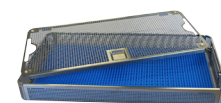

Cordon de résection bipolaire. Covidien
ForceTriad
Réf. D200 190 000



Cordon de résection bipolaire. Erbe
VIO300D
Réf. D200 190 001



Zone Athélia V - 390, Avenue du Mistral - 13600 La Ciotat - France
Tél : +33 (0) 9 51 51 30 30 - Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com


* Imagez toutes les femmes

Delmont Imaging est le fabricant de l'optique, dispositif médical de Classe IIa et du système de résectoscopie de Classe IIa et du système de résectoscopie de Classe IIa portant le marquage CE 1304. Organisme notifié SIQ, présentés dans ce document. Delmont Imaging est le fabricant du câble de lumière, dispositif de classe I.

Document non contractuel - Réf. D900 700 001 D - 06/2018 - Copyright© 2016 DELMONT IMAGING. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans la permission préalable de DELMONT IMAGING.



imaging all the women*

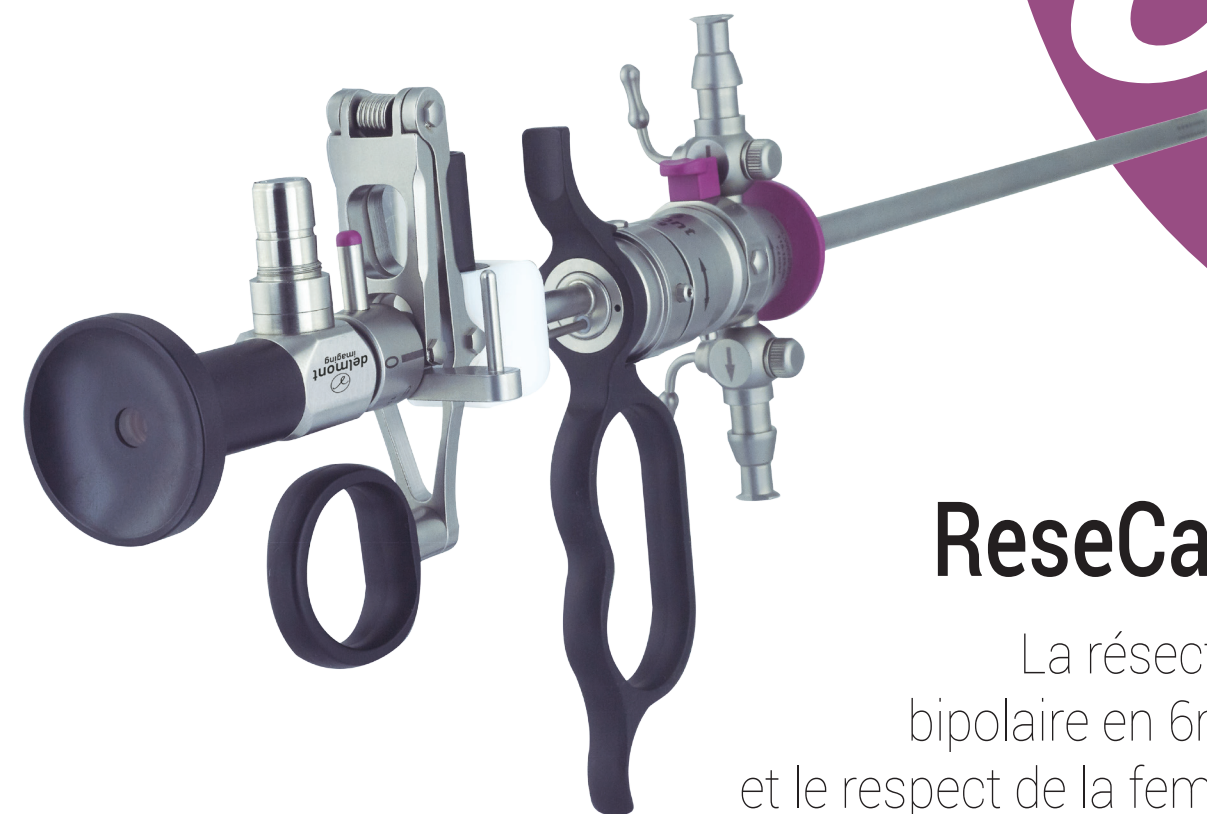

ReseCare
La résection
bipolaire en 6mm
et le respect de la femme






Un résecteur de 18,5Fr. seulement

Petit, mais efficace !

Les avantages de ce faible diamètre sont nombreux, aussi bien pour le praticien que pour la patiente.


Avec **ReseCare**, votre geste opératoire est précis mais aussi plus rapide puisque les étapes de dilatation sont moins nombreuses. Aussi, les copeaux étant de petite taille, leur présence est moins pénalisante pour votre vision et votre confort de travail.

ReseCare respecte vos patientes. La résistance à l'introduction est naturellement réduite et le passage facilité, même chez les femmes ménopausées ou avec un col sténosé. De ce fait, le volume de liquide absorbé par la patiente est moindre et confirmé par un bilan entrée/sortie systématique.

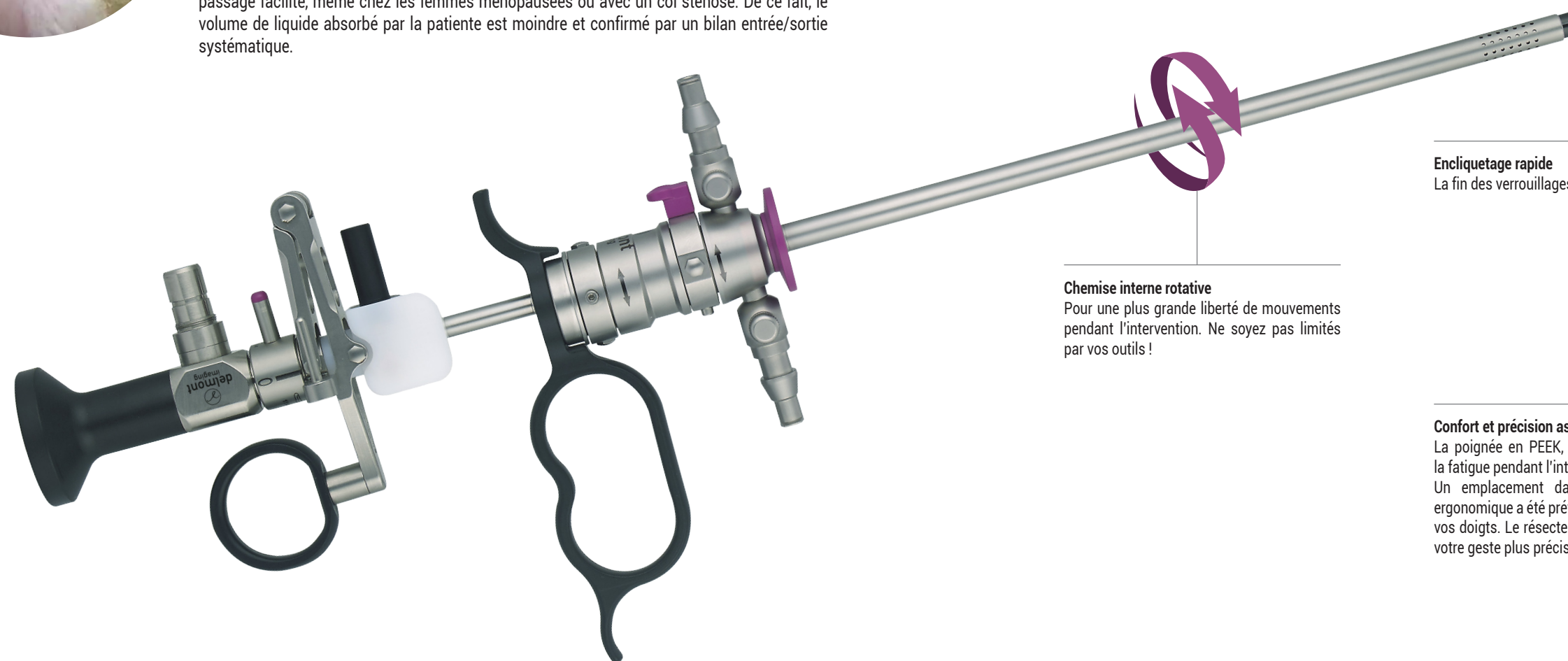


Chemise interne rotative
Pour une plus grande liberté de mouvements pendant l'intervention. Ne soyez pas limités par vos outils !

La qualité dans les moindres détails
Une bonne image passe aussi par un couple «aspiration-irrigation» maîtrisé et performant. La céramique noire élimine tous les reflets parasites.

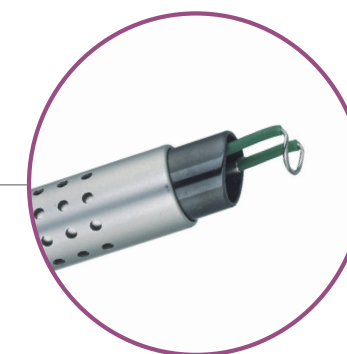

Encliquetage rapide
La fin des verrouillages laborieux !

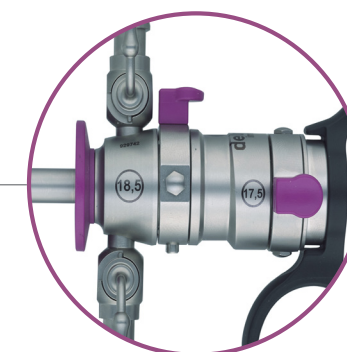

Confort et précision assurés
La poignée en PEEK, ultra-légère, évite la fatigue pendant l'intervention. Un emplacement dans une position ergonomique a été prévu pour chacun de vos doigts. Le résecteur est mieux tenu, votre geste plus précis.





La résection bipolaire

Les avantages de cette technologie, désormais largement répandue, reposent sur deux éléments, tous deux liés à la sécurité de vos patientes.

Tout d'abord, le courant ne traverse plus la patiente pour revenir au générateur, mais revient directement par le résecteur lui-même, réduisant les risques de brûlures liés aux courants de diffusion et de synéchies par destruction de l'endomètre adjacent.

Mais aussi et surtout, un résecteur monopolaire se doit d'utiliser du glycolle dont l'absorption par la patiente est source de troubles ioniques pouvant aller jusqu'au décès. Par opposition, un résecteur bipolaire utilise en lieu et place du glycolle, du sérum physiologique, nullement toxique, et de surcroît moins onéreux. **ReseCare** connecté à un générateur bipolaire vous offre ce surplus de sérénité. Il reste néanmoins compatible et fonctionne parfaitement avec tous les générateurs monopolaires.

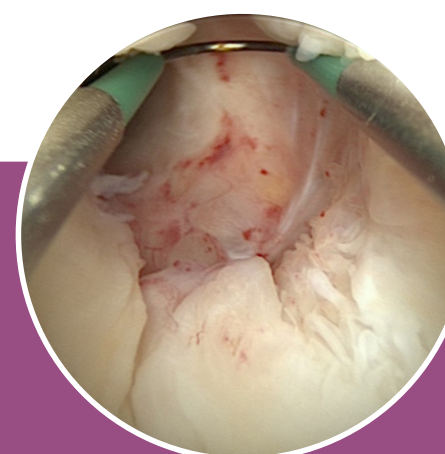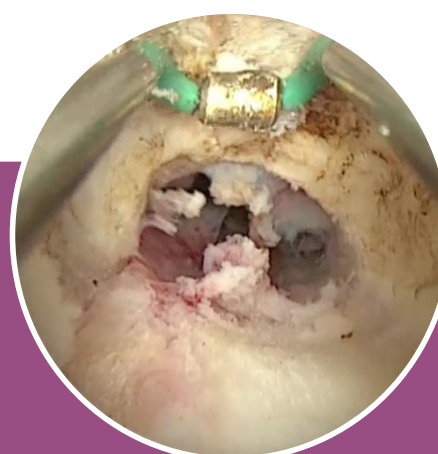

Hystéroscope HD : performances sans égal et longévité assurée

Notre toute dernière génération de lentilles, conçues pour tirer pleinement profit de la HD, procure des images riches, parfaitement résolues, même en périphérie. Cette hyper-résolution, couplée à une lumière répartie de manière véritablement homogène, est gage d'une très grande profondeur de champ. Vous serez «net partout» ! Notre hystéroscope HD est bien entendu autoclavable. Sa conception sous forme de trois tubes distincts le rend résistant, durable mais aussi aisément réparable en cas d'accident.