

Connexion filaire iCare - iPad

Avec les éléments de ce kit, changez votre connexion WiFi en connexion filaire pour le fonctionnement d'iCare avec imagyn.

Articles fournis :

- Un adaptateur iPad,
- Un câble ethernet,
- Un adaptateur USB 3.0 - ethernet.



Connexions :

1 Connecter le câble ethernet à l'adaptateur iPad.



2 Connecter le second bout du câble ethernet à l'adaptateur ethernet.





3 Connecter l'adaptateur iPad.



4 Retirer l'une des deux clés WiFi à l'arrière de l'iCare et brancher l'adaptateur ethernet.



5 Dans les paramètres de l'iPad, vérifier le bon fonctionnement de cette configuration en visualisant l'apparition de l'onglet «Ethernet».

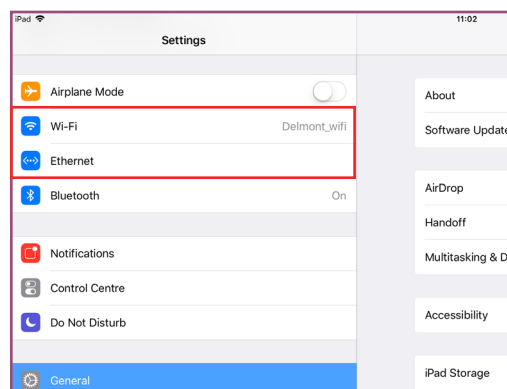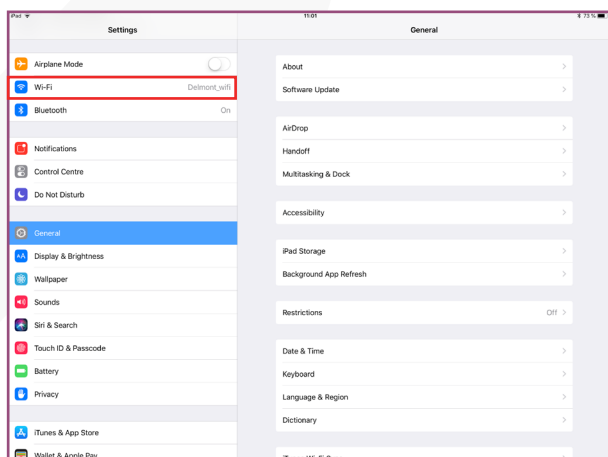

- 6** Pour paramétrer iCare en configuration filaire plutôt que WiFi, appuyez 5 fois longuement sur le bouton droit de la tête de caméra lorsque iCare est en veille. Pour repasser en configuration WiFi, faites 5 appuis longs en mode hors veille.



- 7** A chaque changement de configuration, redémarrez iCare pour finaliser le changement d'état.

Note :



Vous avez la possibilité de charger votre iPad même avec cette connexion filaire, grâce la fiche [1] de l'adaptateur iPad fourni. Une sortie USB [2] est également disponible pour transférer des fichiers d'une clé USB à l'iPad (seulement dans ce sens, les captures d'image faites pendant l'examen ne s'enregistrent pas sur cette clé mais uniquement sur la clé de stockage présente au dos de l'iCare).

delmont imaging

Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat

Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00

www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411