


Fiche technique

Mangeshikar

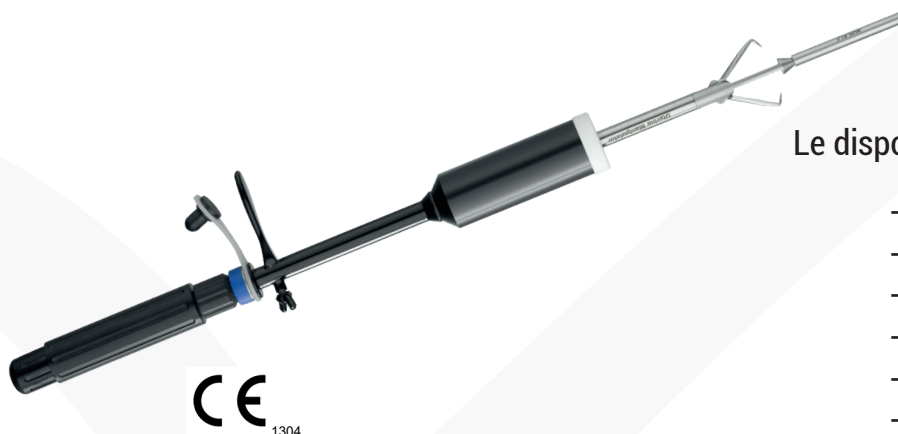


Le dispositif Mangeshikar est composé de :

- 1 poignée
- 1 chemise externe
- 1 chemise interne
- 1 insert avec mors Pozzi
- 1 chemise coulissante
- 3 coupes
- 7 tiges intra-utérines

Informations générales	
Descriptif	Manipulateur utérin réutilisable
Utilisation prévue	Utilisation en coelioscopie pour la manipulation ou/et l'ablation de l'utérus
Code GMDN	15677
Classe	Ila
Conformité	Conforme à la Directive Européenne 93/42/CEE
Normes applicables	Voir la Déclaration de Conformité CE pour plus de détails
Produits toxiques/allergènes	Sans latex, sans DEHP, sans Halogène

Données techniques	
Poignée	
Descriptif	Poignée rotative pour manipulateur utérin Mangeshikar
Photo	
Référence article	D300 120 100
Code GTIN/UID ID	3701217803602
Rotation	- Sens horaire : ouverture des mors Pozzi - Sens anti-horaire : fermeture des mors Pozzi
Longueur	110mm
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails
Chemise externe	
Descriptif	Chemise externe avec écrou de fixation pour manipulateur utérin Mangeshikar
Photo	
Référence article	D300 120 101
Code GTIN/UID ID	3701217803596
Diamètre de la chemise externe	10mm
Longueur	290mm
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails
Chemise interne	
Descriptif	Chemise interne avec goupille de fixation pour manipulateur utérin Mangeshikar
Photo	
Référence article	D300 120 102
Code GTIN/UID ID	3701217803589
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails
Chemise coulissante	
Descriptif	Chemise coulissante à associer avec une coupole pour manipulateur utérin Mangeshikar
Photo	
Référence article	D300 120 103
Code GTIN/UID ID	3701217803572
Bouchon d'étanchéité	Oui

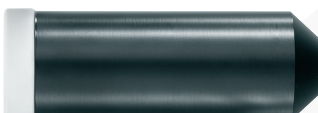Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails			
Mors Pozzi				
Descriptif	Mors Pozzi pour la fixation du col utérin, pour manipulateur utérin Mangeshikar			
Photos				
Référence article	D300 120 107			
Code GTIN/UID ID	3701217803534			
Longueur des mors	30mm			
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails			
Coupoles				
Descriptif	Coupoles avec anneau blanc isolant			
Photo				
Référence article	D300 120 104	D300 120 105	D300 120 106	
Code GTIN/UID ID	3701217803565	3701217803558	3701217803541	
Diamètre	35mm	40mm	45mm	
Longueur	100mm			
Anneau blanc isolant	oui			
Epaisseur de l'anneau	4mm			
Longueur de l'anneau	10mm			
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails			
Tiges intra-utérines				
Descriptif	Tiges intra-utérines			
Photo				
Autoclavable	Oui. Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails			
Liste des produits (1/2)				
Référence article	D300 120 108	D300 120 109	D300 120 110	D300 120 111
Code GTIN/UID ID	3701217803527	3701217803510	3701217803503	3701217803497
Diamètre	4mm	5mm	6mm	7mm
Longueur	40mm	50mm	60mm	70mm
Liste des produits (2/2)				
Référence article	D300 120 112	D300 120 113	D300 120 114	
Code GTIN/UID ID	3701217803138	3701217803121	3701217803091	
Diamètre	8mm	8mm	8mm	
Longueur	80mm	120mm	150mm	

Retraitement

Voir le manuel d'utilisation pour plus de détails.

Nettoyage et désinfection automatisés

Pré-nettoyage	1 Démontez le dispositif autant que possible. Immergez le dans l'eau froide du robinet pendant au moins 5 minutes. 2 Brossez le dispositif sous l'eau froide jusqu'à ce que tous les résidus visibles aient été éliminés. Les canaux intérieurs, les fils et les trous doivent être rincés avec un pistolet à jet d'eau pendant au moins 10 secondes en mode pulsé. 3 Immergez le dispositif dans un bain ultrasonique alcalin (0,5%) et traitez aux ultrasons pendant 15 minutes à 40°C. Solution utilisée: Neodisher Mediclean forte ; Dr. Weigert ; Hambourg. 4 Sortez le dispositif du bain et rincez-le à l'eau froide du robinet.
Nettoyage automatisé	1 Placez le dispositif dans un panier sur le module d'insertion et commencez le processus de nettoyage. Machine utilisée : Miele G 7736 CD, module insérable Miele E 327-06, module CMI Miele E 450 2 Prérincez pendant 1 min. avec de l'eau froide. Drainage. 3 Prérincez pendant 3 min. avec de l'eau froide. Drainage. 4 Lavez pendant 5 min. à 55°C avec une solution alcaline à 0,5% ou à 45°C avec une solution enzymatique. Solution utilisée: Neodisher FA; Dr. Weigert (alkaline) ou Endozime, Ruhof (enzymatique) 5 Drainage. 6 Neutralisez pendant 3 minutes avec de l'eau chaude du robinet (>40°C) et un agent neutralisant. Solution utilisée : Neodisher Z; Dr. Weigert. Drainage. 7 Rincez à l'eau tiède du robinet (>40°C) pendant 2 minutes.
Désinfection	1 Désinfection thermique automatisée 95s. à 95°C. Conformément à la norme ISO 15883 et en tenant compte des exigences nationales concernant la valeur A0.
Séchage	Séchez l'extérieur du dispositif en effectuant un cycle de séchage de la machine de nettoyage/désinfection. Si nécessaire, le séchage manuel peut également être effectué à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Séchez les cavités en soufflant avec de l'air comprimé stérile

Stérilisation

Vide fractionné	Température	Temps	Séchage
3 phases avec une pression d'au moins 60 millibars	134°C	Au moins 4 min.	Au moins 10 min.

Conformément à la norme ISO 13060 / ISO 17665 et en tenant compte des exigences nationales respectives.

Environnement

Condition	Température	Humidité	Pression
Transport	-20°C à +60°C	10 à 90%	800 à 1060 hPa
Stockage	-20°C à +60°C	10 à 90%	800 à 1060 hPa
Utilisation	+10°C à + 40 °C	30 à 75%	800 à 1060 hPa

delmont imaging

Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat

Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00

www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411