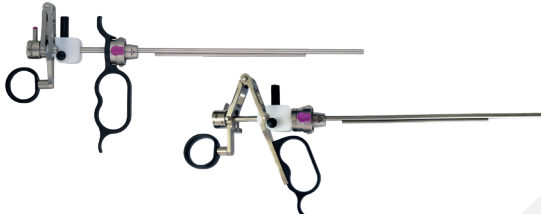
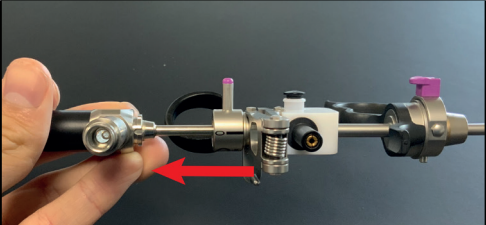
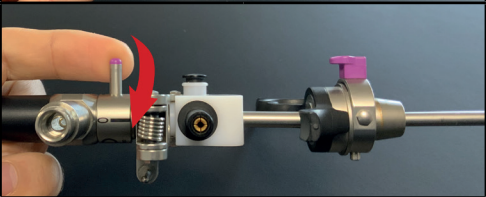
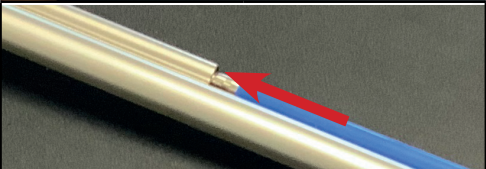
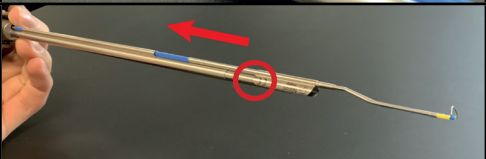
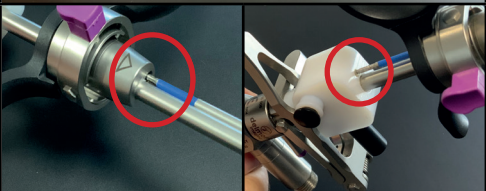
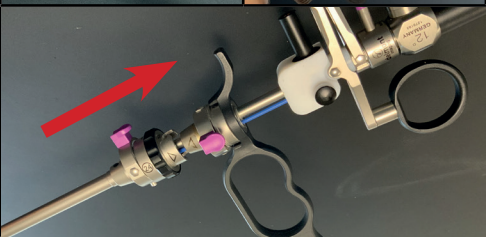
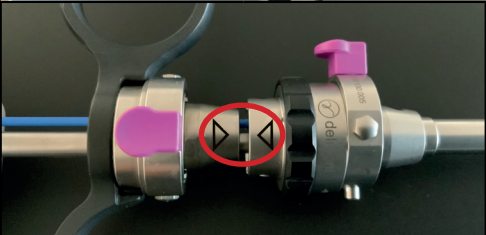
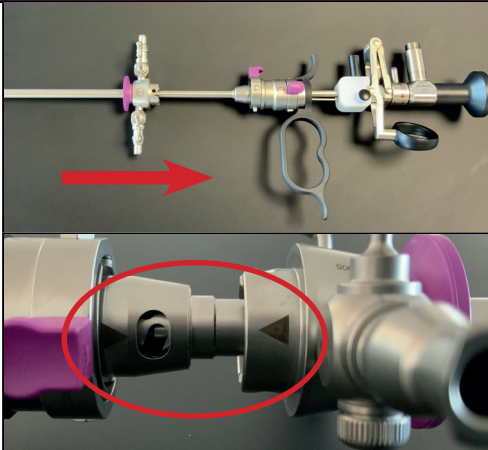
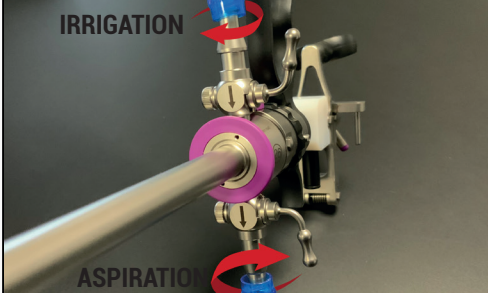
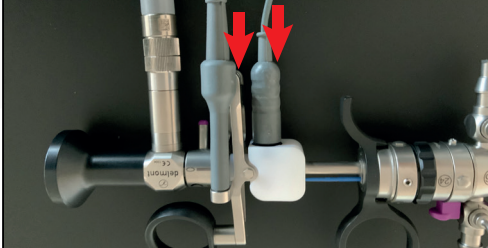
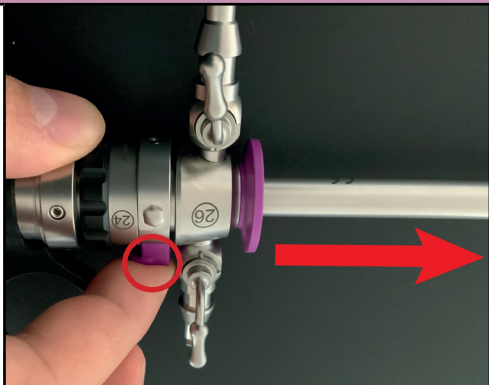
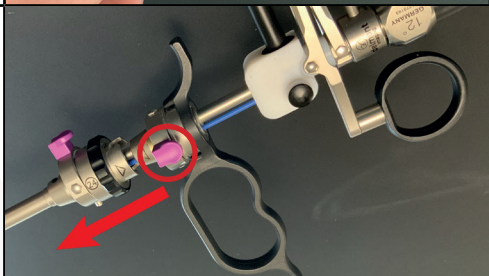
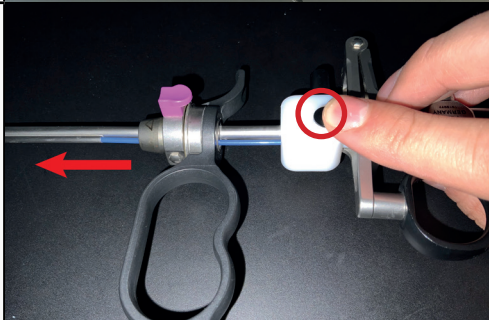
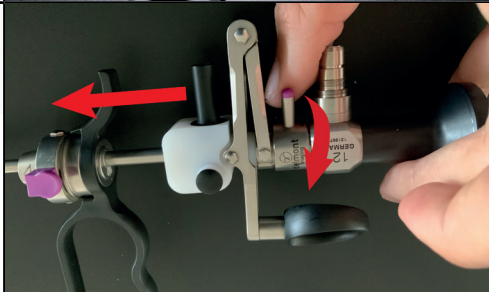


Quick-start MaxiCare

Éléments du set	
	Hystéroscope 4mm
	Élément de travail passif ou actif
	Chemise interne 24Fr.
	Chemise externe 26Fr.
	Electrodes de résection
Autres produits nécessaires au fonctionnement	
Câble de lumière	
Caméra d'endoscopie	
Câble de résection bipolaire	
Tube d'irrigation	
Tube d'aspiration	

Etape	Photo	Description
Montage		
1		Insérer l'hystéroscope dans l'élément de travail.
		- Pour associer l'hystéroscope et l'élément de travail, le levier de verrouillage doit être tourné de sorte à ce que le «0» soit en face du connecteur du câble de lumière de l'hystéroscope. - Tourner le levier pour finaliser l'assemblage.
2		Insérer l'électrode de résection de votre choix.
		- Introduire l'électrode dans le petit tube dédié de l'élément de travail. - Faire coulisser le demi-tube de l'électrode le long de l'élément de travail.
		 Toujours manipuler l'électrode en la tenant par le demi-tube. Au niveau proximal de l'élément de travail, l'électrode doit être insérée dans le trou dédié. Continuer de coulisser l'électrode jusqu'à ce qu'un «clic» de verrouillage se fasse entendre.
3		Insérer la chemise interne.
		- Introduire l'ensemble des éléments déjà assemblés dans la chemise interne. - Des flèches sont présentes sur l'élément de travail et la chemise interne. Elles doivent être alignées. - Pour finaliser l'assemblage, pousser la chemise interne dans l'élément de travail. Un «clic» de verrouillage doit se faire entendre.

Etape	Photo	Description
4		Insérer la chemise externe. • Introduire l'ensemble des éléments déjà assemblés dans la chemise externe. • Des flèches sont présentes sur la chemise interne et la chemise externe. Elles doivent être alignées. • Pour finaliser l'assemblage, pousser la chemise externe dans la chemise interne. Un « clic » de verrouillage doit se faire entendre.
Connexion des produits annexes à MaxiCare		
1		Connecter le câble de lumière. • Visser le câble au connecteur dédié de l'hystéroscope.
2		Connecter les tubes d'irrigation et d'aspiration. • Des flèches sont présentes sur les deux robinets pour indiquer le sens du flux.  Veillez à connecter les tubes d'irrigation et d'aspiration aux robinets correspondants.
3		Connecter les deux embouts du câble bipolaire. • Les connecteurs ont un diamètre différent, prévenant toute erreur de branchement.
4		Connecter la caméra d'endoscopie sur l'hystéroscope.

Etape	Photo	Description
Démontage		
1		Déconnecter les produits annexes à MaxiCare. Retirer la chemise externe. Appuyer sur le bouton quick-lock afin de déverrouiller la chemise externe.  Glisser la chemise externe en la maintenant bien droite jusqu'au retrait complet, afin de ne pas endommager les produits.
2		Retirer la chemise interne. Appuyer sur le bouton quick-lock afin de déverrouiller la chemise interne.  Glisser la chemise interne en la maintenant bien droite jusqu'au retrait complet, afin de ne pas endommager les produits.
3		Retirer l'électrode de résection. Appuyer sur le bouton poussoir noir de l'élément de travail afin de déverrouiller l'électrode.  - Essayer de retirer l'électrode sans appuyer sur le bouton poussoir va l'endommager. - L'électrode doit être retirée et manipulée en la tenant par le demi-tube.
4		Retirer l'hystéroscope. Tourner le levier de verrouillage afin de pouvoir retirer l'hystéroscope.  Glisser l'hystéroscope en le maintenant bien droit jusqu'au retrait complet, afin de ne pas endommager les produits.