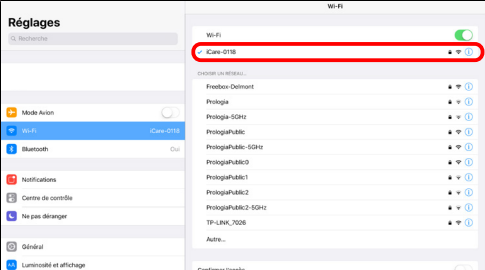
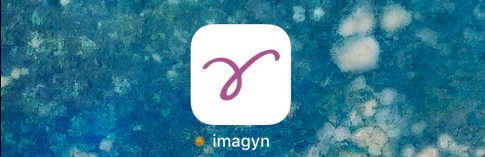
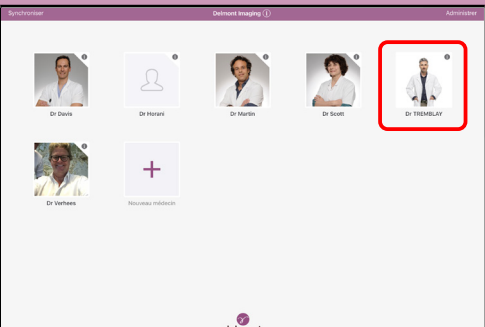
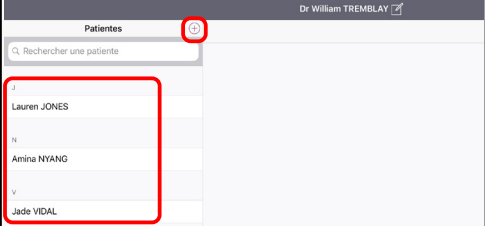
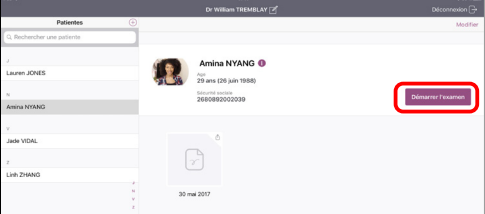
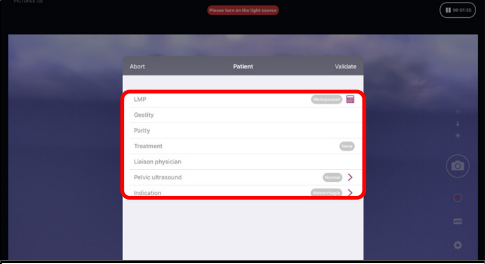
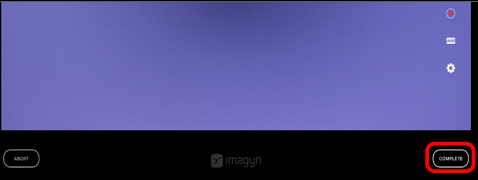
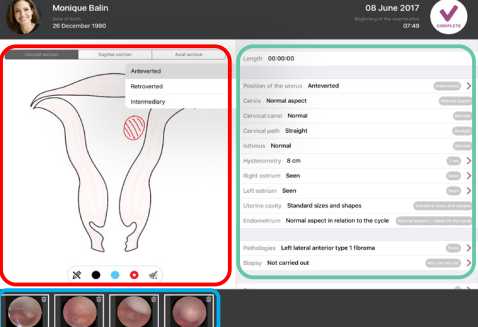
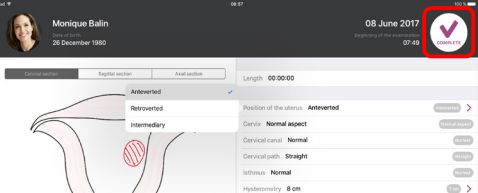
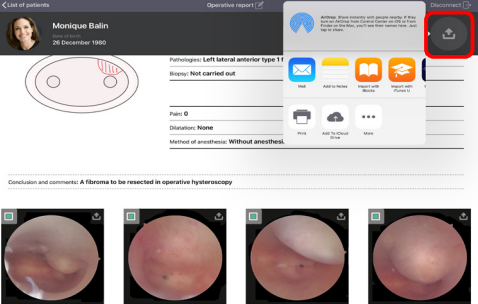


Quick-start iCare+

Etape	Photo	Description
Mise en route de la colonne iCare +		
1		Allumer la colonne. - Mettre en position «I» l'interrupteur du chariot. - L'interrupteur vert s'éclaire.
2		Allumer iCare. Mettre en position «I» l'interrupteur sur la face arrière de l'appareil.
3		Attendre 30 secondes pour qu'iCare démarre. - Le logo clignote rapidement pendant l'allumage. - Lorsque cette phase est finie, le logo clignote lentement.
4		Connecter la caméra et le câble de lumière. La caméra se connecte à droite tandis que le câble de lumière se branche à gauche.  Pour la connexion de la caméra, aligner les points rouges avant clipsage.
5		Vérifier le bon fonctionnement du moniteur. Le message «source à LED en veille» doit apparaître à l'écran.
6		Allumer l'iPad. Appuyer sur le bouton veille présent sur le côté de l'iPad.

Etape	Photo	Description
7		Vérifier la connexion de l'iPad au Wifi d'iCare. Aller dans l'onglet Wifi des réglages de l'iPad.
8		Lancer imagyn.
Réalisation d'un examen et d'un compte-rendu avec iCare+		
1		Sélection du compte médecin. Un code personnel à 6 chiffres est nécessaire afin d'accéder au compte.
2		Création d'une nouvelle patiente. (ou sélectionner la patiente dans la liste si elle existe déjà).
3		Démarrer l'examen. Appuyer sur le bouton correspondant.

Etape	Photo	Description
4		Remplir les champs préliminaires si souhaité. Pas de champs obligatoire.
5		Vérifier l'image de la caméra sur l'iPad. L'image doit être la même que celle sur le moniteur.
6		Activer la source de lumière. Appuyer sur le bouton sur la face latérale droite de l'appareil iCare.
7		Effectuer une balance des blancs. - Filmer une surface blanche. - Appuyer sur le bouton AWB jusqu'à apparition du message «AWB in progress...». (Avec la tête de caméra ou le bouton  sur l'iPad) - Continuer à filmer la surface blanche jusqu'à apparition du message «AWB OK».
8		Si nécessaire, ajuster les réglages de la caméra. Appuyer sur le bouton  pour accéder au panneau de réglage.

Etape	Photo	Description
9	 Appui court pour changer l'intensité lumineuse. - Appui court pour prendre une photo. - Appui long pour démarrer/arrêter l'enregistrement d'une vidéo.	Effectuer l'hystéroscopie. - Lors de l'examen, si nécessaire vous pouvez : - Prendre des photos. (Avec la tête de caméra ou le bouton  sur l'iPad) - Prendre une vidéo. (Avec la tête de caméra ou le bouton  sur l'iPad) - Changer l'intensité lumineuse entre MIN et MAX. (Avec la tête de caméra ou le bouton  sur l'iPad) - Faire un zoom numérique. (Avec le bouton  sur l'iPad)
10		Finaliser l'examen. Appuyer sur le bouton correspondant pour se rendre sur l'édition du compte-rendu.
11		Editer le compte-rendu. - Trois différentes parties sont disponibles: Rouge : Dessiner sur les trois sections de l'utérus avec le stylet Apple. Bleue : Dessiner sur les photos prises et les annoter. Verte : Remplir les différents champs du compte-rendu.
12		Compléter l'édition du compte-rendu. Appuyer sur le bouton correspondant.
13		Si nécessaire, exporter le rapport (ou seulement les photos). Vous pouvez l'imprimer ou l'envoyer par e-mail par exemple.