


Société															
Nom du produit	ReseCare	MaxiCare	Pas de nom	Pas de nom			TCRis			Princess		Resec- tion Master	Gubbini		
												Ellipse	Original	Midi	
Photo	Voir en annexe de ce document														
Taille de l'hysté- roscope corres- pondant	2,9 mm	4 mm	4 mm	2,9 mm	4 mm	4 mm	2,7 mm	3,3 mm	2,9 mm						
Diamètre du résecteur	18,5 Fr.	26 Fr.	26 Fr.	15 Fr.	22 Fr.	26 Fr.	25,5 Fr.	21 Fr.	24,5 Fr.	27 Fr.	15 Fr.	16 Fr.	18,5 Fr.		
Forme externe du résecteur	Ronde		Ronde	Ronde			Ronde	Ronde			Ellipse	Ronde			
Élément de travail	Passif ou actif		Passif ou actif	Passif			Passif ou actif	Passif ou actif	Passif	Passif		Passif ou actif			
Chemises disso- ciables	✓		✓	✓			✓	✓			✓				
Chemises rota- tives	✓		✓	✓	Au choix		Au choix	Au choix	✓	NC*	Au choix				
Quick-lock entre les deux che- mises et l'élément de travail	✓		✓	✓			✓	✓			✓				

Société			 SOPRO COMEG									
Nom du produit	ReseCare	MaxiCare	Pas de nom	Pas de nom			TCRis	Princess	Resec-tion Master	Gubbini		
										Ellipse	Original	Midi
Compatible avec d'autres endoscopes du marché (connexion non captive)	✓		✓	✓			✗	✓		✓		
Résecteur et électrodes utilisables en monopolaire	✓		✗	✗			✗	✗		✓		
Aspiration automatique des copeaux	✗		✗	✗			✗	✗	✓ Aspire mal les copeaux	✗		
Isolation	Céramique noire		Céramique noire	Céramique blanche			Céramique noire	Céramique noire		Céramique noire		
Nombre d'électrodes proposées	5	11	5	1	3	5	9	4	3	3	5	5
Electrode à anse angulée	R+UU	R+UU	R	UU*	R	R 2 tailles	R 6 tailles	UU	UU	R+UU	R+UU 2 tailles	R
Electrode à anse droite	R+UU	R+UU	✗	✗		R	✗	✗		✗	R+UU	R
Electrode couteau	R+UU	R+UU	R	✗	R	R	R	R	R	R+UU		R

Société			 SOPRO COMEG	 KARL STORZ ENDOSKOPE								
Nom du produit	ReseCare	MaxiCare	Pas de nom	Pas de nom			TCRis	Princess	Resec- tion Master	Gubbini		
										Ellipse	Original	Midi
Electrode rouleau	R+UU	R+UU	R	✗			✗	UU	UU	✗	R	
Electrode boule	✗	✓	R 2 tailles	✗	R	R	R	✗		R+UU		R
Electrode de vaporisation	R+UU	R+UU 6 types	✗	✗			R	UU	✗	✗		
Commentaires				Forme inhabi- tuelle, les co- peaux se coincident dans l'anse.	Barre de retour sur les électrodes, les copeaux se coincent dans l'anse.			Que de l'usage unique, excepté le couteau.		Forme inhabi- tuelle, les copeaux se coincent dans les anse.		
												    
										Résecteur à 0°.		

Annexe :

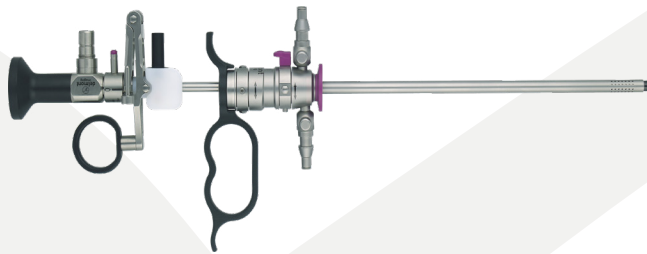


ReseCare




SOPRO COMEG



OLYMPUS

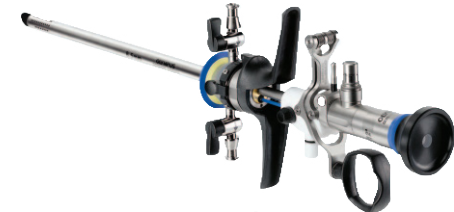

TCRis

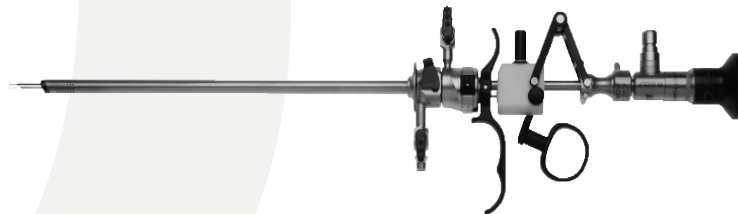

Princess 21Fr.

TONTARRA



Gubbini Original