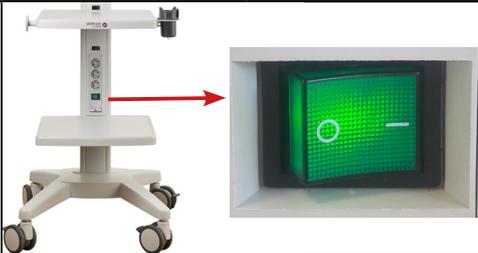


Quick-start iCare+

Etape	Photo	Description
Mise en route de la colonne iCare +		
1		<p>Allumer la colonne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre en position «I» l'interrupteur du chariot. • L'interrupteur vert s'éclaire.
2		<p>Allumer iCare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mettre en position «I» l'interrupteur sur la face arrière de la voie de commande.
3		<p>Attendre 30 secondes pour qu'iCare démarre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendant l'allumage, un écran de boot s'affiche. • Lorsque cette phase est finie, l'écran d'accueil apparaît.
4		<p>Connecter la tête de caméra sur le connecteur droit de la face avant de la voie de commande.</p> <p> Pour la connexion de la caméra, aligner les points avant clipsage.</p>
5		<p>Connecter le câble de lumière sur le connecteur gauche de la face avant de la voie de commande.</p> <p>Si iCare SLIDe :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur l'écran d'accueil, sélectionner le menu «câble de lumière» à l'aide des boutons de la tête de caméra. • Choisir le standard adapté au câble de lumière que vous souhaitez utiliser. • Le valider puis connecter votre câble à iCare. <p> Si iCare non SLIDe : uniquement standard Storz.</p>

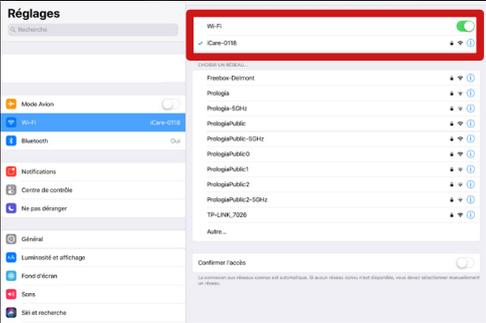
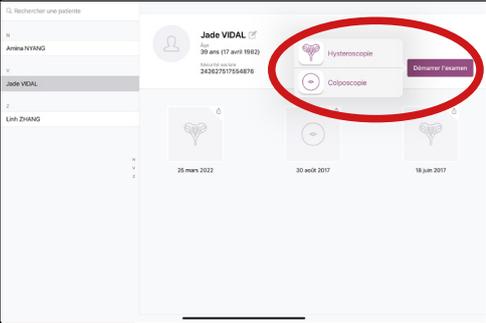
delmont imaging

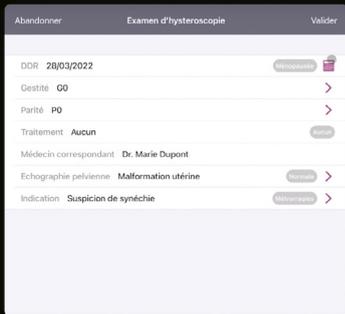
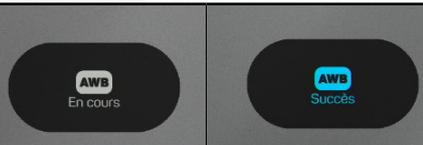
Athélia V - 390, Av. du Mistral - 13600 La Ciotat

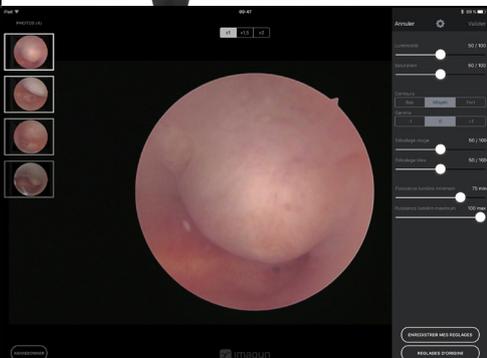
Tel. : +33(0) 9 51 51 30 30 - fax : +33(0) 9 57 51 31 00

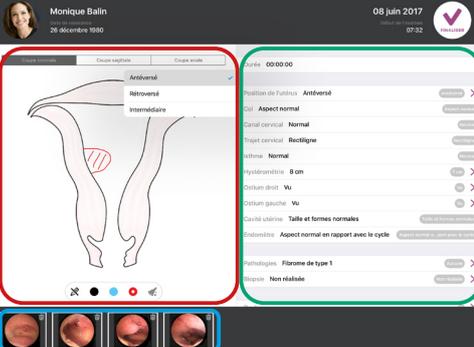
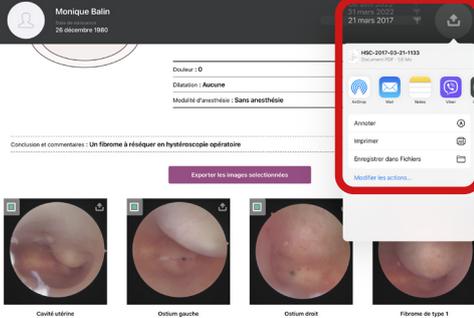
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

SAS au capital de 237 200 euros - RCS Marseille 817 710 411 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 81 817 710 411

Etape	Photo	Description
Configuration de l'application imagyn sur iPad		
1		<p>Déverrouiller l'iPad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur le bouton veille présent sur le côté de l'iPad. Balayer le bord inférieur de l'écran vers le haut pour afficher l'écran d'accueil.
2		<p>Vérifier que l'iPad est connecté au réseau Wi-Fi de l'iCare.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aller dans l'onglet Wi-Fi de l'application réglages de l'iPad.
3		<p>Lancer imagyn  et sélectionner le compte du médecin.</p> <ul style="list-style-type: none"> Un code personnel à 6 chiffres est nécessaire afin d'accéder au compte.
4		<p>Création d'une nouvelle patiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur le bouton (+) pour créer le dossier de la patiente. Si la patiente est déjà dans la base de données, sélectionner son dossier depuis la liste. Une barre de recherche est disponible.
5		<p>Démarrer l'examen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur le bouton de l'examen correspondant (Hystérocopie ou Colposcopie).

Etape	Photo	Description
Réglages avant examen		
1		<p>Remplir les champs préliminaires si souhaité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une fois le remplissage terminé, sélectionner « Valider ». Aucun champs n'est obligatoire. <p>Une sélection de réponses pré-écrites est disponible en cliquant sur les flèches violettes.</p> <p>Les encadrés grisés permettent le remplissage automatique du champs.</p>
2		<p>Allumer la source de lumière.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur le bouton sur la face latérale droite de la voie de commande. • À l'écran, la page d'accueil est remplacée par l'image de la caméra qui s'affiche.
3		<p>Vérifier l'image de la caméra sur l'iPad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'image doit être la même que celle sur le moniteur.
4	<p>Appui long pour enclencher la balance des blancs</p>  	<p>Effectuer une balance des blancs.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Filmer une surface blanche. • Appuyer sur le bouton jusqu'à apparition du message «AWB En cours» . <p>(Avec la tête de caméra ou le bouton AWB sur l'iPad)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuer à filmer la surface blanche jusqu'à apparition du message «AWB Succès».

Etape	Photo	Description
Réalisation d'un examen et édition d'un compte-rendu opératoire		
1	 <p>Appui court ou long</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anti-moiré - Gain - Zoom - Aucune action <p>- Appui court pour prendre une photo.</p> <p>- Appui long pour démarrer/arrêter l'enregistrement d'une vidéo.</p>	<p>Effectuer l'hystérocopie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'examen, si nécessaire vous pouvez : - Prendre des photos. (Avec la tête de caméra ou le bouton  sur l'iPad) - Prendre une vidéo. (Avec la tête de caméra ou le bouton  sur l'iPad) - Autre action: anti-moiré, gain, zoom, pas d'action. (Avec le bouton de la tête de caméra programmé dans la section «actions utilisateur»  des paramètres d'iCare.) - Régler l'intensité lumineuse. (Avec les boutons «+» et «-» sur la face latérale droite de la voie de commande.
2		<p>Si nécessaire, ajuster les réglages de la caméra depuis l'iPad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur le bouton  pour accéder au panneau des réglages image.
3		<p>Finaliser l'examen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur le bouton correspondant pour se rendre sur l'édition du compte-rendu.

Etape	Photo	Description
4		<p>Editer le compte-rendu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trois différentes parties sont disponibles: <ul style="list-style-type: none"> - Rouge : Dessiner sur les trois sections de l'utérus avec le stylet Apple. - Bleue : Dessiner sur les photos prises et les annoter. - Verte : Remplir les différents champs du compte-rendu.
5		<p>Finaliser l'édition du compte-rendu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appuyer sur le bouton correspondant.
6		<p>Si nécessaire, exporter le rapport.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De nombreuses options d'export sont disponibles: envoi par e-mail sécurisé, impression ou encore partage dans un dossier réseau partagé.