

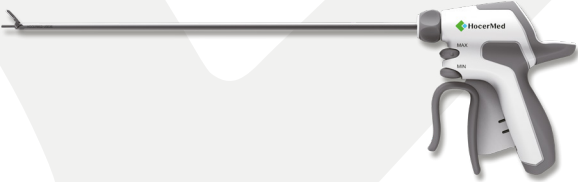


Mains non stériles



Mains stériles

Quick-start iScalpel

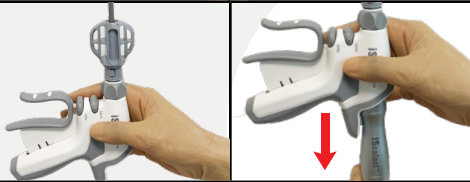
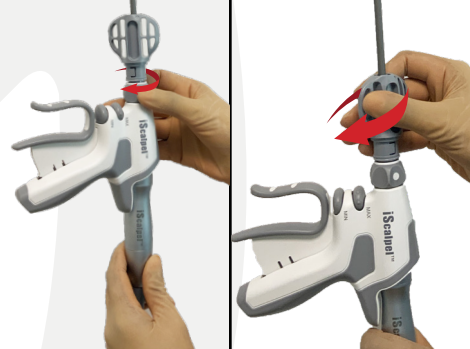
Générateur	
	Générateur à ultrasons
Instrumentation	
	Transducteur
	Poignée de dissection ultrasonique
	Transducteur pour poignée courte
	Poignée courte de dissection ultrasonique
	Pédale double de commande (optionnel)



Mains non stériles



Mains stériles

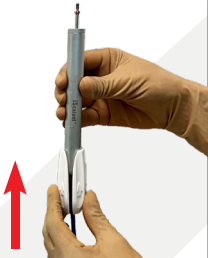
Etape	Photo	Description
Les étapes suivantes s'accomplissent avec des mains non stériles 		
Allumage du générateur		
1		Mise sous tension • Branchez le générateur à une prise secteur. • Connectez la double pédale de commande si existante (flèche).
2		Mise en service • Appuyez sur le bouton de veille sur le devant du boîtier. • Un écran d'allumage apparaît puis le système démarre.
Assemblage de la poignée		
1		• Ouvrez l'emballage de la poignée stérile.
Les étapes suivantes s'accomplissent avec des mains stériles 		
2		• Saisissez le transducteur et positionnez-le à la verticale.
3		• Saisissez la poignée et levez-la, mors vers le haut. • Déposez la poignée sur le transducteur. ⚠ Alignez les deux objets pour qu'ils s'emboîtent parfaitement. La poignée ne doit pas vaciller.
4		Verrouillez l'ensemble • Tournez le module de rotation de la poignée dans le sens horaire jusqu'à sentir une résistance. • Serrez l'ensemble en tournant 2 fois la clé de serrage dans le sens horaire. Chaque tour s'accompagne d'un clic. ⚠ Ne pas tourner le transducteur lui-même sous peine de torsion du câble.
5		• Activez la gâchette pour fermer complètement les mors et retirez la clé de serrage. ⚠ Ne jetez pas la clé de serrage et gardez-la pour le désassemblage.



Mains non stériles



Mains stériles

Etape	Photo	Description
Assemblage de la poignée courte		
L'étape suivante s'accomplit avec des mains non stériles		
1		Ouvrez l'emballage de la poignée stérile.
Les étapes suivantes s'accomplissent avec des mains stériles		
2		- Insérez la pièce antidérapante à la base du transducteur. - Positionnez le transducteur à la verticale et maintenez-le dans cette position. ⚠ Une fois installée, toujours manipuler et maintenir le transducteur en le tenant par la pièce antidérapante blanche.
3	 	Verrouillez l'ensemble - Saisissez la poignée et levez-la, mors vers le haut. - Déposez la poignée sur le transducteur. ⚠ Alignez les deux objets pour qu'ils s'emboîtent parfaitement La poignée ne doit pas vaciller.
4	 	- Serrez la poignée pour fermer complètement les mors et positionnez la clé de serrage sur les mors. - Serrez l'ensemble en tournant 2 fois la clé de serrage dans le sens horaire. Chaque tour s'accompagne d'un clic. - Retirez la clé de serrage. ⚠ Ne jetez pas la clé de serrage et gardez-la pour le désassemblage.
5		Enlevez la pièce antidérapante.



Mains non stériles



Mains stériles

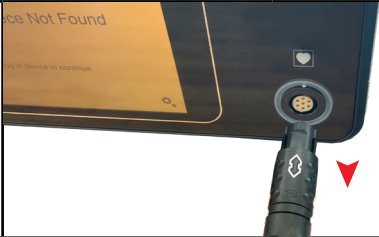
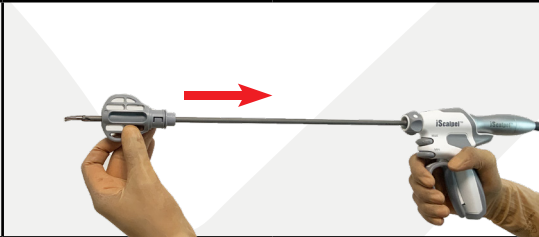
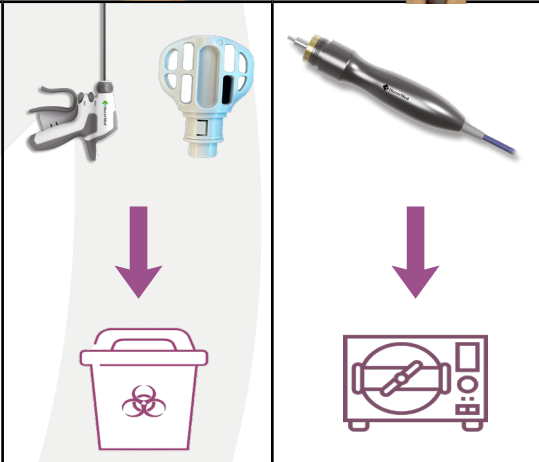
Etape	Photo	Description
Les étapes suivantes s'accomplissent avec des mains non stériles 		
Utilisation		
1		Branchez le connecteur du câble du transducteur à la prise présente sur le devant du générateur.  Alignez les flèches présentes sur l'embout du câble et le point présent sur la prise pour une bonne connexion.
2		Le générateur va automatiquement lancer une reconnaissance d'instrument.
Les étapes suivantes s'accomplissent avec des mains stériles 		
3	Active l'instrument pendant 2 secondes pour effectuer le test Ouvrir les mors pendant le test 	- Un test d'instrument est exigé. - Suivez les instructions affichées à l'écran.
4		L'écran d'accueil s'affiche une fois le test réussi.
5		- Les boutons MIN et MAX représentent un niveau d'énergie ultrasonique délivré à la poignée. - Lors de l'activation de MIN ou de MAX, un signal lumineux et un signal sonore s'activent. (Sur l'image d'exemple, le bouton MAX est activé)
L'étape suivante s'accomplit avec des mains non stériles 		
6		Réglez le niveau d'énergie MIN grâce aux flèches.



Mains non stériles



Mains stériles

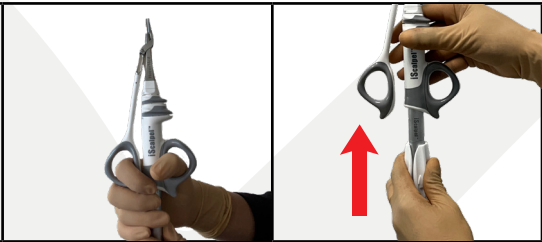
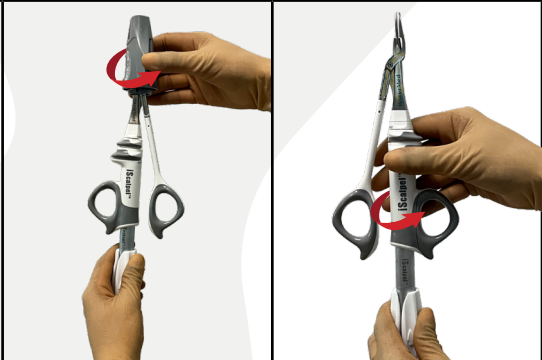
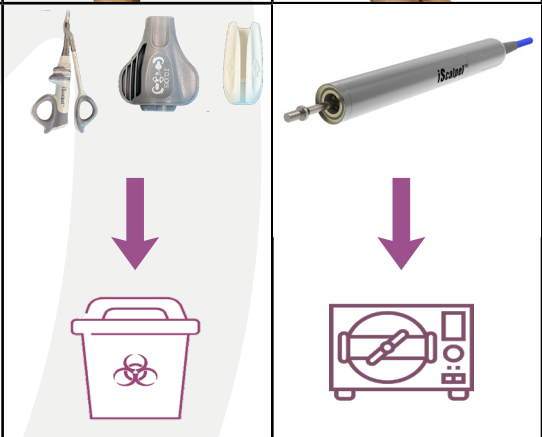
Etape	Photo	Description
Désassemblage de la poignée		
L'étape suivante s'accomplit avec des mains non stériles 		
1		Débranchez le connecteur du câble du transducteur à la prise présente sur le devant du générateur.  Tirez le connecteur vers vous sans le tourner.
Les étapes suivantes s'accomplissent avec des mains stériles 		
2		Activez la gâchette pour fermer complètement les mors et insérez la clé de serrage sur la poignée.
3		- Tournez la clé dans le sens anti-horaire. - Finissez de dévisser le transducteur en tournant le module de rotation dans le sens anti-horaire.  Ne pas tourner le transducteur lui-même sous peine de torsion du câble.
4		- Jetez la poignée ainsi que la clé de serrage à usage unique. - Le transducteur doit être retiré et stérilisé.



Mains non stériles



Mains stériles

Etape	Photo	Description
Désassemblage de la poignée courte		
L'étape suivante s'accomplit avec des mains non stériles		
1		Débranchez le connecteur du câble du transducteur à la prise présente sur le devant du générateur.  Tirez le connecteur vers vous sans le tourner.
Les étapes suivantes s'accomplissent avec des mains stériles		
2		- Tenez la poignée verticalement. - Insérez la pièce antidérapante à la base du transducteur.
3		- Serrez la poignée pour fermer complètement les mors et insérez la clé de serrage sur la poignée. - Tournez la clé dans le sens anti-horaire. - Finir de dévisser la poignée en la tournant sur elle-même dans le sens anti-horaire.  Ne pas tourner le transducteur lui-même sous peine de torsion du câble.
4		- Jetez la poignée, la clé de serrage et la pièce antidérapante à usage unique. - Le transducteur doit être retiré et stérilisé.