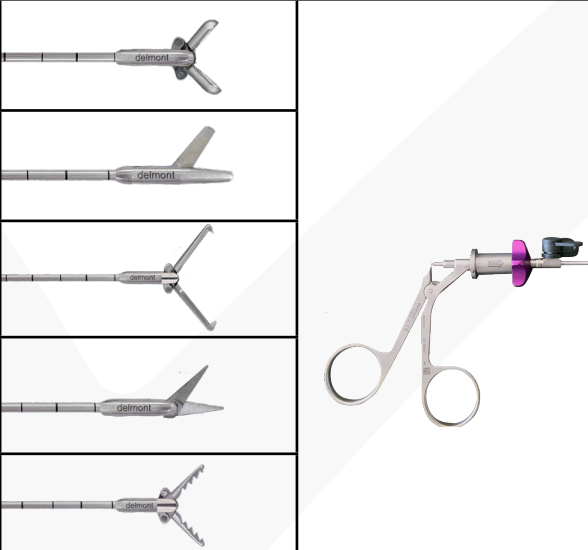
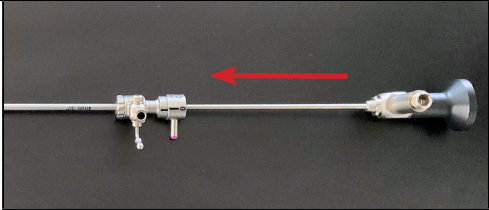
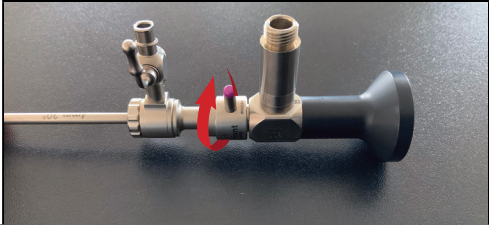
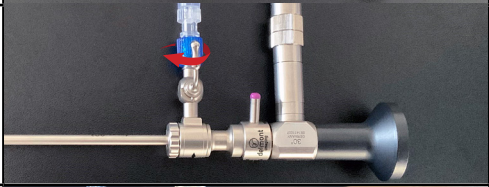
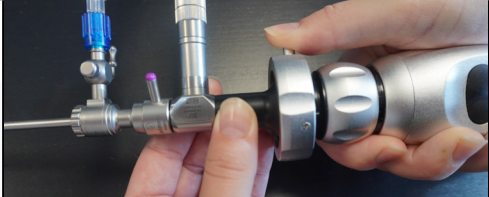
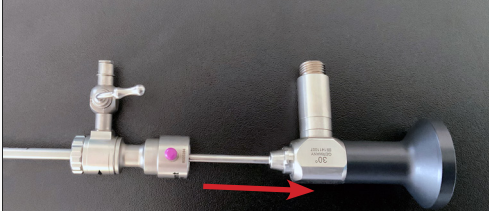


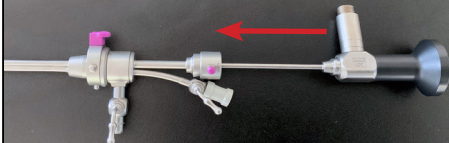
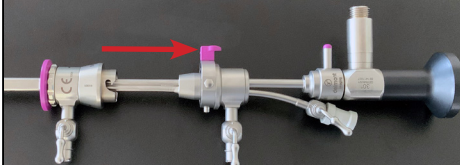
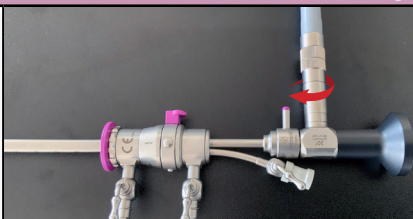
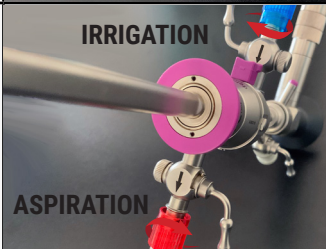
Quick-start EasyCare

Éléments du set	
	Hystéroscope 2,9mm
	Chemise opératoire interne 4,9mm
	Chemise opératoire externe 5,5mm
	Chemise diagnostique 4mm
	Instruments semi-rigides rotatifs 7Fr. (pince à biopsies, paire de ciseaux arrondis, pince à extractions, paire de ciseaux pointus, pince à préhensions)
Autres produits nécessaires au fonctionnement	
Câble de lumière	
Caméra d'endoscopie	
Tube d'irrigation	
Tube d'aspiration	

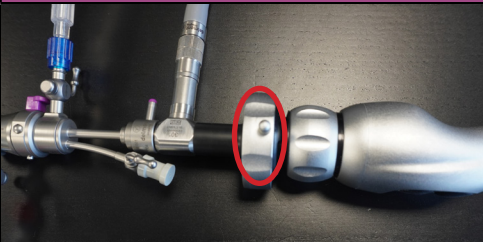
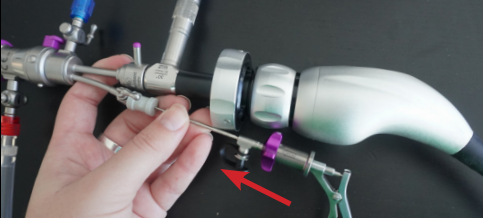
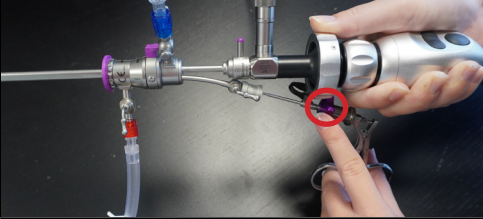
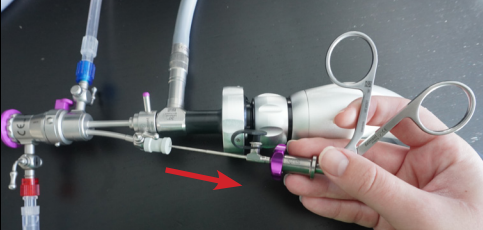
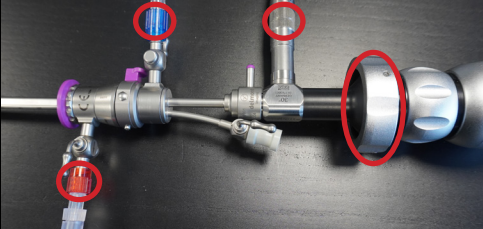
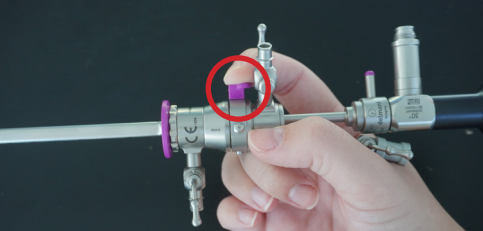
Hystéroskopie diagnostique

Etape	Photo	Description
Montage		
1		Insérer l'hystéroscope dans la chemise diagnostique.
		- Pour associer l'hystéroscope et la chemise diagnostique, le levier de verrouillage doit être tourné de sorte à ce que le «0» soit en face du connecteur du câble de lumière de l'hystéroscope. - Tourner le levier pour finaliser l'assemblage.
Connexions des produits annexes à EasyCare		
1		Connecter le câble de lumière. Visser le câble au connecteur dédié de l'hystéroscope.
2		Connecter le tube d'irrigation. Pour activer le flux, ouvrir le robinet d'irrigation.
3		Connecter la caméra d'endoscopie sur l'hystéroscope.
Démontage		
1		Déconnecter les produits annexes.
		Retirer l'hystéroscope. Tourner le levier de verrouillage afin de pouvoir retirer l'hystéroscope.  Glisser l'hystéroscope en le maintenant bien droit jusqu'au retrait complet, afin de ne pas tordre l'hystéroscope.

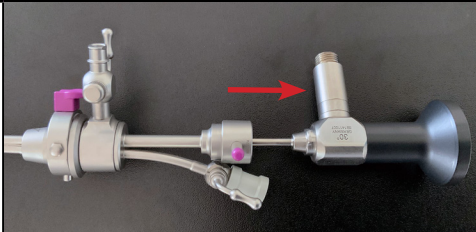
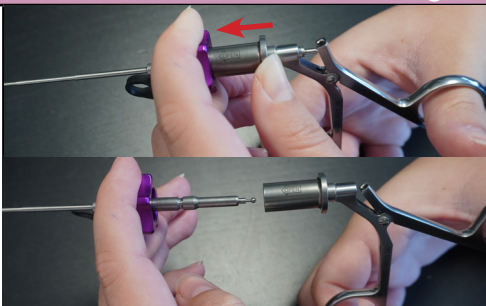
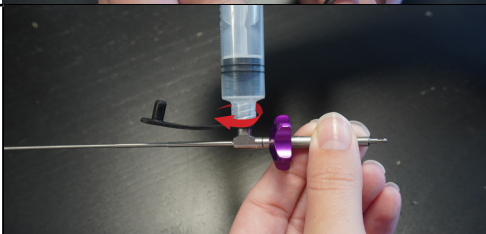
Hystéroscopie opératoire

Etape	Photo	Description
Montage		
1		Insérer l'hystéroscope dans la chemise interne.
		- Pour associer l'hystéroscope et la chemise interne, le levier de verrouillage doit être tourné de sorte à ce que le «0» soit en face du connecteur du câble de lumière de l'hystéroscope. - Tourner le levier pour finaliser l'assemblage.
2		Insérer la chemise externe (si besoin). Introduire l'ensemble des éléments déjà assemblés dans la chemise externe.
		- Des flèches sont présentes sur la chemise interne et la chemise externe. Elles doivent être alignées. - Pour finaliser l'assemblage, pousser la chemise externe dans la chemise interne. Un «clac» de verrouillage doit se faire entendre.
Connexion des produits annexes à EasyCare		
1		Connecter le câble de lumière. Visser le câble au connecteur dédié de l'hystéroscope.
2		Connecter les tubes d'irrigation et d'aspiration. Des flèches sont présentes sur les deux robinets pour indiquer le sens du flux.  Veillez à connecter les tubes d'irrigation et d'aspiration aux robinets correspondants.

Hystéroscopie opératoire

Etape	Photo	Description
3		Connecter la caméra d'endoscopie sur l'hystéroscope.
4		Insérer l'instrument de votre choix. Faire coulisser l'instrument à travers le bouchon d'étanchéité en maintenant les mors fermés.  Si une résistance survient, réajuster la position.
5		Utiliser l'élément rotatif. Tourner l'élément rotatif lorsque une rotation des mors de l'instrument est nécessaire.  Conserver le bouchon du canal de nettoyage fermé durant l'opération.
Démontage		
1		Retirer l'instrument.  L'instrument doit être retiré avec précaution et ne pas être tordu pour éviter des dommages.
2		Déconnecter les produits annexes.
3		Retirer la chemise externe. Appuyer sur le bouton quick-lock afin de déverrouiller la chemise externe.  Glisser la chemise externe en la maintenant bien droite jusqu'au retrait complet, afin de ne pas tordre l'hystéroscope.

Hystéroscopie opératoire

Etape	Photo	Description
4		Retirer l'hystéroscope. Tourner le levier de verrouillage afin de pouvoir retirer l'hystéroscope.  Glisser l'hystéroscope en le maintenant bien droit jusqu'au retrait complet, afin de ne pas endommager les produits.
Démontage de l'instrument		
1		Séparer la tige de la poignée. - Pousser l'instrument à l'endroit indiqué par un logo «OPEN» tout en ouvrant la poignée. - Tirer la tige hors de la poignée.
2		Nettoyer l'instrument. - Ouvrir le bouchon du canal de nettoyage. - Connecter une seringue au connecteur luer-lock pour nettoyer l'instrument en profondeur.