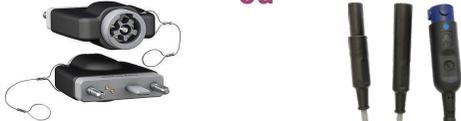


Générateur	Prise compatible	Câble et adaptateur à utiliser	Vérification du programme	Puissance conseillée	Pédale	
Erbe Vio 300 D 	Prise MF 	 Référence : D200 190 001	Le programme de résection bipolaire ne s'affiche pas automatiquement : sélectionner-le dans la liste des programmes disponibles.	Coupe : Effet 3 Coag : Effet 3 		
	Prise MF-2 	 Référence adaptateur : D200 190 033 Référence câble : D200 190 001	S'il n'est pas présent, il n'a pas encore été créé. Rapprochez-vous du personnel du centre de soins pour la création.	Les courants à utiliser sont Bipolar CUT ++ et Bipolar SOFT COAG ++ .		
Erbe Vio 3 	Prise MF 	 Référence : D200 190 001	Tous les programmes sont préalablement installés. Quand vous connectez un câble, le générateur le reconnaît automatiquement et affiche le programme adéquat.	Coupe : Effet 5 Coag : Effet 5		
	Prise MF-U 	 Référence : D200 190 034				OU
		 Réf.: D200 190 033 Réf. : D200 190 001				

Générateur	Prise compatibles	Câble à utiliser	Vérification du programme	Puissance conseillée	Pédale
Valleylab ForceTriad 	Prise LigaSure 2  Elle est positionnée en bas, en face du logo de la pédale orange.	 Référence : D200 190 000	<p>Le programme de résection bipolaire est optionnel et doit avoir été acheté et activé. La référence Covidien de l'option résection bipolaire est FTBRKIT.-</p> <p> Le générateur est compatible si la version du logiciel est d'au moins 3.30.</p> <p>En théorie, si le programme a été acheté et installé, un sticker mentionnant « Bipolar resection » a été collé en face avant du générateur en dessous de la prise correspondante.</p>	Coupe : Effet 3 Coag : Effet 3	 Le connecteur de cette pédale spécifique est orange. La référence Covidien correspondant à cette pédale est FT6009.
Valleylab ForceFT10 	Prise LigaSure/ Bipolar 	Référence : D200 190 000	<p>Sur ce générateur, le programme résection bipolaire est présent automatiquement.</p>	Coupe : Effet 4 Coag : Effet 4	La référence Covidien correspondant à cette pédale est FT6009.
Storz Autocon II 400 	Prise MF 	 Référence : D200 190 001	<p>Le programme de résection bipolaire à choisir est le «Saline-bi-TUR-P».</p> <p> Ce programme est seulement disponible sur les modèles «Bipolar» ou «High end».</p>	Coupe : Effet 5 Coag : Effet 5 <p> Les courants à utiliser sont: Saline-C-Cut Saline-Coag</p>	

Générateur	Prise compatible	Câble et adaptateur à utiliser	Vérification du programme	Puissance conseillée	Pédale
<p>Storz Autocon III 400</p> 	<p>Prise Bipolar</p> 	 <p>Référence : D200 190 008</p>	<p>Quand vous connectez un câble, le générateur le reconnaît automatiquement et affiche le programme adéquat («Bip. resection» pour la résection bipolaire).</p>  <p>Ce système de reconnaissance n'est pas disponible aux Etats Unis et désactivé pour la version UH 400U.</p>	<p>Coupe : Effet 2 Coag : Effet 3</p>	
<p>KLS Martin Maxium</p> 	<p>Prises Bipolar B1 ou B2</p> 	 <p>Référence : D200 190 006</p>	<p>Vérifier que le programme de résection bipolaire a été installé. Il s'agit d'une option pour Référence 80-093-00-04.</p>  <p>Le générateur est compatible seulement si la version du logiciel est d'au moins 6.</p>	<p>Coupe : G3 Coag : 80 Watts Courant Bipol pure cut</p>	

Générateur	Prise compatible	Câble et adaptateur à utiliser	Vérification du programme	Puissance conseillée	Pédale
Bowa ARC 350 	Prise Bipolar 3 		<p>Vérifier que le programme de résection bipolaire a été installé. Il s'agit d'une option pour Référence BOWA 900-395.</p> <p>Quand ce programme est installé, lorsque vous connectez un câble, le générateur le reconnaît automatiquement et affiche le programme adéquat.</p>	Coupe : Effet 2 Coag : Effet2	
Bowa ARC 400 	Prise Bipolar 3/ 4 	Référence : D200 190 008	<p>Vérifier que le programme de résection bipolaire a été installé. Il s'agit d'une option pour Référence BOWA 900-395.</p> <p>Quand ce programme est installé, lorsque vous connectez un câble, le générateur le reconnaît automatiquement et affiche le programme adéquat.</p>	Coupe : Effet 2 Coag : Effet2	