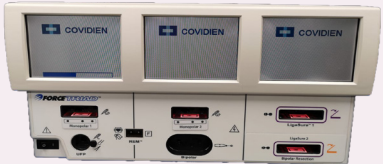


Générateur	Prise compatible	Câble et adaptateur à utiliser	Vérification du programme	Puissance conseillée	Pédale
Erbe Vio 300 D 	Prise MF 	 Référence : D200 190 001	Le programme de résection bipolaire ne s'affiche pas automatiquement : sélectionner-le dans la liste des programmes disponibles.	Coupe : Effet 3 Coag : Effet 3 	
	Prise MF-2 	 Référence adaptateur : D200 190 033 Référence câble : D200 190 001	S'il n'est pas présent, il n'a pas encore été créé. Rapprochez-vous du personnel du centre de soins pour la création.	Les courants à utiliser sont Bipolar CUT ++ et Bipolar SOFT COAG ++ .	
Erbe Vio 3 	Prise MF 	 Référence : D200 190 001	Tous les programmes sont préalablement installés. Quand vous connectez un câble, le générateur le reconnaît automatiquement et affiche le programme adéquat.	Coupe : Effet 5 Coag : Effet 5	
	Prise MF-U 	 Référence : D200 190 034			
	 Réf.: D200 190 033 ou Réf. : D200 190 001				

Générateur	Prise compatibles	Câble à utiliser	Vérification du programme	Puissance conseillée	Pédale
Valleylab ForceTriad 	Prise LigaSure 2  Elle est positionnée en bas, en face du logo de la pédale orange.	 Référence : D200 190 000	Le programme de résection bipolaire est optionnel et doit avoir été acheté et activé. La référence Covidien de l'option résection bipolaire est FTBRKIT.- ⚠ Le générateur est compatible si la version du logiciel est d'au moins 3.30. En théorie, si le programme a été acheté et installé, un sticker mentionnant « Bipolar resection » a été collé en face avant du générateur en dessous de la prise correspondante.	Coupe : Effet 3 Coag : Effet 3	 Le connecteur de cette pédale spécifique est orange. La référence Covidien correspondant à cette pédale est FT6009.
Valleylab ForceFT10 	Prise LigaSure/ Bipolar 	Référence : D200 190 000	Sur ce générateur, le programme résection bipolaire est présent automatiquement.	Coupe : Effet 4 Coag : Effet 4	
Storz Autocon II 400 	Prise MF 	 Référence : D200 190 001	Le programme de résection bipolaire à choisir est le «Saline-bi-TUR-P». ⚠ Ce programme est seulement disponible sur les modèles «Bipolar» ou «High end».	Coupe : Effet 5 Coag : Effet 5 ⚠ Les courants à utiliser sont: Saline-C-Cut Saline-Coag	

Générateur	Prise compatible	Câble et adaptateur à utiliser	Vérification du programme	Puissance conseillée	Pédale
Storz Autocon III 400 	Prise Bipolar 	 Référence : D200 190 008	Quand vous connectez un câble, le générateur le reconnaît automatiquement et affiche le programme adéquat («Bip. resection» pour la résection bipolaire).  Ce système de reconnaissance n'est pas disponible aux Etats Unis et désactivé pour la version UH 400U.	Coupe : Effet 2 Coag : Effet 3	
KLS Martin Maxium 	Prises Bipolar B1 ou B2 	 Référence : D200 190 006	Vérifier que le programme de résection bipolaire a été installé. Il s'agit d'une option pour Référence 80-093-00-04.  Le générateur est compatible seulement si la version du logiciel est d'au moins 6.	Coupe : G3 Coag : 80 Watts Courant Bipol pure cut	

Générateur	Prise compatible	Câble et adaptateur à utiliser	Vérification du programme	Puissance conseillée	Pédale
Bowa ARC 350 	Prise Bipolar 3 	 Référence : D200 190 008	Vérifier que le programme de résection bipolaire a été installé. Il s'agit d'une option pour Référence BOWA 900-395. Quand ce programme est installé, lorsque vous connectez un câble, le générateur le reconnaît automatiquement et affiche le programme adéquat.	Coupe : Effet 2 Coag : Effet2	
Bowa ARC 400 	Prise Bipolar 3/ 4 	Référence : D200 190 008	Vérifier que le programme de résection bipolaire a été installé. Il s'agit d'une option pour Référence BOWA 900-395. Quand ce programme est installé, lorsque vous connectez un câble, le générateur le reconnaît automatiquement et affiche le programme adéquat.	Coupe : Effet 2 Coag : Effet2	
Versapoint II 		 Réf. : D200 190 008 ou  Réf. : D200 186 006	Le programme de résection bipolaire est présent automatiquement. Lorsque vous connectez l'adaptateur, le générateur le reconnaît et affiche le programme adéquat.	Coupe : 120 Coag : 90	