



delmont
imaging



MaxiCare

La résection bipolaire en 9mm



PRÉSENTATION DE MAXICARE

Les éléments du set



- Le set MaxiCare comprend :
 - Le résecteur complet
 - Un câble de lumière avec embouts Storz
 - 4 électrodes
- Le résecteur peut être décliné en version active.
- Les accessoires en option sont :
 - Un panier de stérilisation
 - Un tube de stérilisation pour les électrodes
 - Un obturateur classique ou visuel
 - Les cordons de résections bipolaires pour les générateurs Erbe et Covidien
 - **6 électrodes de vaporisations**

Un diamètre de 26Fr.

- Idéal pour les pathologies sévères.
- La **vaporisation** est aussi un avantage de MaxiCare : pas de copeaux, plus rapide et moins dangereux.




Une qualité de vision HD

- Un hystéroscope 4mm HD
- Images hyper-résolues avec une répartition lumineuse homogène
- Grande profondeur de champ
- Autoclavable
- Durable et résistant grâce à sa conception en 3 tubes




De nombreux avantages

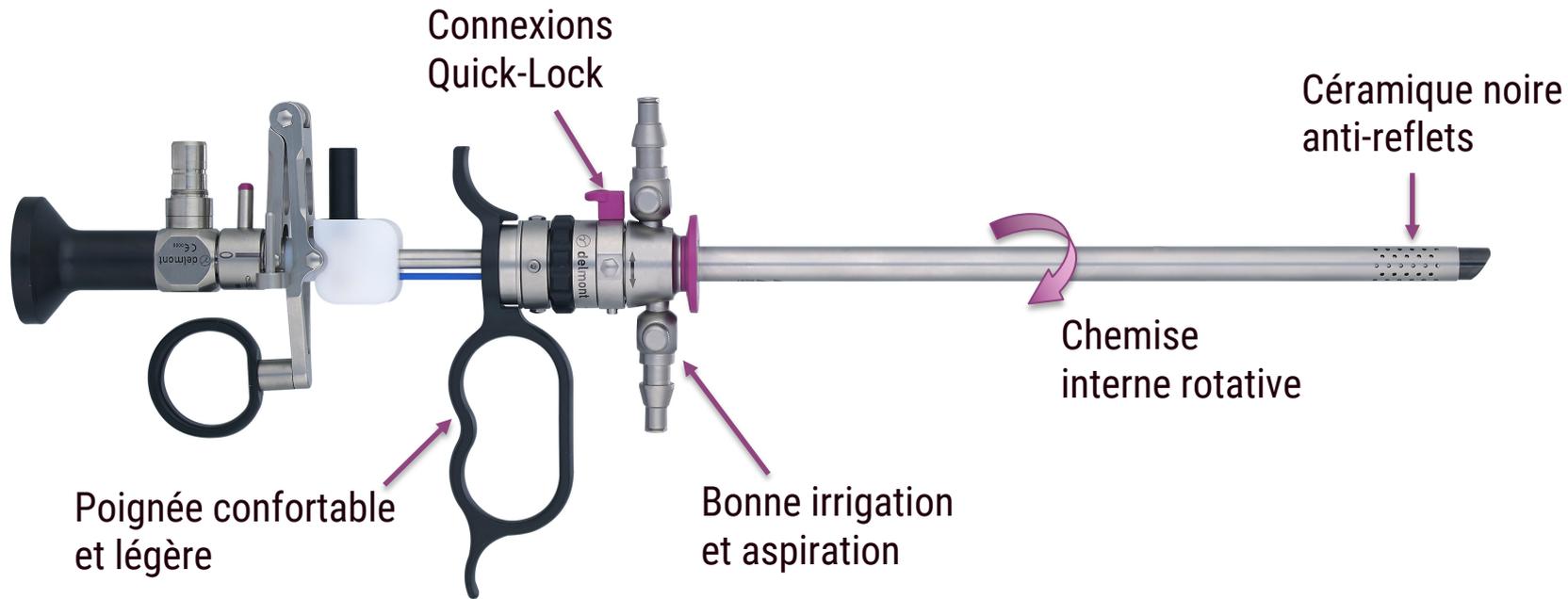



MAXICARE FACE A LA CONCURRENCE

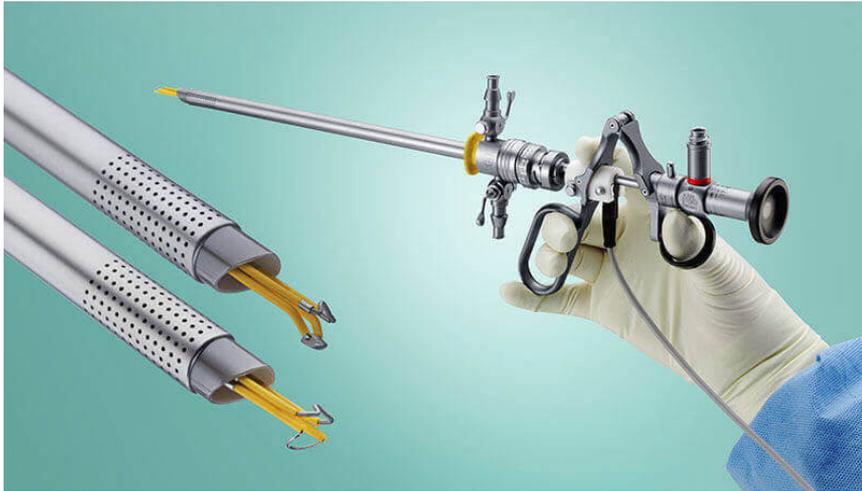

Storz possède un résecteur 26Fr. Il le propose avec un hystéroscope 4mm de 12°.

Les 

Les 

- Pas d'électrodes de vaporisation
- Les électrodes bipolaires présentent **la barre de retour** : gênant car les copeaux s'y coincent...

Résection Master de R. Wolf



R. Wolf possède un résecteur 27Fr. Il le propose avec un hystéroscope **3,3mm** de 30°.

Les 	Les 
<ul style="list-style-type: none">- Présente un aspirateur de copeaux 	<ul style="list-style-type: none">- Résecteur plus gros pour une optique plus petite- Les copeaux réalisés doivent être très petits pour l'aspirateur de copeaux



Olympus possède un résecteur 26Fr. Il le propose avec un hystéroscope 4mm de 12° ou 30°.

Les 	Les 
<ul style="list-style-type: none">- Connexion Quick lock endoscope / résecteur- L'électrode de vaporisation Plasma 	<ul style="list-style-type: none">- Connexion endoscope / résecteur captif



**COMMENT UTILISER MAXICARE
LORS D'UNE DÉMONSTRATION ?**

Les indications

- Patiente :

De préférence, éviter d'utiliser MaxiCare sur une patiente nullipare ou ménopausée ou avec un col sténosé. *(Le marché de ReseCare)*

- Pathologie :

Toutes les pathologies réalisables par résection sont possibles. Mais en préférer une où le praticien est expérimenté.

Les réglages générateurs bipolaires

Modèle	Paramétrage	Notes
Covidien / Valleyleab Force Triad	Coupe : 40 Coagulation : 60	À augmenter si le cas médical l'exige
Erbe Vio	Coupe : Effet 3 Coagulation : Effet 3	Possibilité de baisser ces valeurs mais garder Effet 3 en règle générale
BOWA	Coupe : Effet 2 Coagulation : Effet 2	

Les trucs & astuces

- Se renseigner préalablement sur le matériel présent au bloc : générateur et source de lumière.
 - Fournir les câbles/embouts adéquats !
- Le jour de la démonstration :
 - Paramétrer adéquatement le générateur
 - Aider le praticien pour le montage de MaxiCare & le choix de l'électrode selon la pathologie
 - Conseiller une dilatation jusqu'à 9
 - Adapter les paramètres générateurs durant la chirurgie si besoin





UN EXEMPLE

⌘ Myomectomie par le Pr. Fernandez

