

Instructions de montage: Chariot iCare+



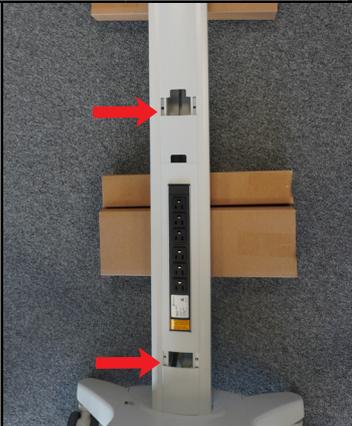
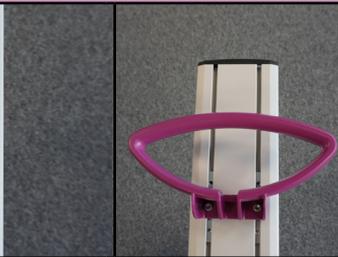
Temps de montage: 30 min à 1 heure



Matériel nécessaire : 3 clés Allen (fournies)

Toutes les parties à assembler sont fournies avec leurs vis

Etapes	Photo	Description
Assemblage de la colonne sur le pied		
1		<ul style="list-style-type: none"> Déballer tous les équipements du carton.
2		<ul style="list-style-type: none"> Positionner le pied à la verticale sur les 2 roues arrière. Positionner la colonne à l'horizontale et la surélever à l'aide des 2 petits cartons de calage présents dans le paquet. Alignez la avec l'emplacement dédié du pied.
3		<ul style="list-style-type: none"> Récupérer le câble électrique de la colonne et le passer à travers le trou du pied. Enclencher les 4 vis pour assembler la colonne et le pied. Serrer les vis avec la clé Allen. <p> <i>Il y a une seule vis avec écrou dont la position n'a pas d'importance.</i></p>
4		<ul style="list-style-type: none"> Dévisser le passe câble. Ensuite, passer le câble à l'intérieur. Revisser le passe câble. <p> <i>Penser à orienter le câble vers l'arrière du chariot.</i></p>

Etapes	Photo	Description
Fixation des étagères sur la colonne		
1	 <p>Etagère du dessus (avec le logo sur le devant)</p>	 <p>Etagère du dessous</p>
2	 	<ul style="list-style-type: none"> Repérer les emplacements prévus pour les étagères. Les fixer à l'aide de 2 vis chacune. Serrer les vis avec la clé Allen. <p> <i>Déplacer les caches s'ils bloquent la fixation.</i></p>
Fixation du bras pour écran sur la colonne		
	  	<ul style="list-style-type: none"> Retirer le cache en plastique du bras du moniteur et le positionner sur la colonne. Placer les 4 vis et serrer avec la clé Allen. Repositionner le cache en plastique sur le bras du moniteur. <p> <i>Déplacer les caches en plastique de la colonne s'ils bloquent la fixation.</i></p>
Fixation de la poignée		
	  	<ul style="list-style-type: none"> Relever la colonne sur ses 4 roues. À l'arrière de la colonne, fixer la poignée avec 2 vis à l'emplacement dédié (au niveau des 2 trous du milieu) Serrer les vis avec la clé Allen.

Etapes	Photo	Description
Assemblage des accessoires		
1		<ul style="list-style-type: none"> Sur la partie droite de l'étagère du haut, fixer le support de caméra sur les deux trous les plus à gauche à l'aide de deux vis. Serrer les vis à la clé Allen et positionner les caches gris sur les têtes de chaque vis.
2		<ul style="list-style-type: none"> Sur la même étagère, et du même côté, fixer un support de câble dans le trou restant. Faites de même dans l'unique trou du côté gauche de l'étagère avec le second support de câble.
3		<ul style="list-style-type: none"> Ajouter les caches gris sur chaque support de câble précédemment fixés.
4		<ul style="list-style-type: none"> Dévisser les 2 vis présentes sur le bras du moniteur. Positionner le support VESA moniteur comme montré ci-contre et le fixer à l'aide des 2 vis mises de côté.
5		<ul style="list-style-type: none"> Visser à la main les crochets à la barre de potence. <p> Une fois les crochets vissés sur la barre de potence on ne peut plus les enlever.</p>
6		<ul style="list-style-type: none"> Insérer la barre de fer dans l'emplacement dédié au sommet de la colonne. <p> Insérer le picot de la potence au bon endroit dans la colonne.</p>