

ReseCare (XXL) СОСТОИТ ИЗ:

HD гистероскоп 2,9 мм, 12°
Автоклавируемый. Длина: 300 мм / 395 мм (XXL)
арт. D300 100 004 / D300 100 087 (XXL)

Внешний тубус 18,5Fr.
Двойной поток. Quick lock.
арт. D300 130 000 / D300 130 088 (XXL)

Внутренний тубус 17,5Fr.
Вращающийся
арт. D300 130 001 / D300 130 089 (XXL)

Пассив. рабочий элемент
Совместим с моно- и би-
арт. D300 130 002

Актив. рабочий элемент
Совместим с моно- и би-
арт. D300 130 009

Световод
Автоклавируемый, Ø: 3,5 мм, Длина: 2,3 м, с коннекторами Storz
арт. D200 150 500

Электроды:

Описание	Артикул	
	Стерильные, одноразовые (10 шт./упак.)	Многоразовые
РЕЖУЩАЯ ПЕТЛЯ 30°	D300 140 067	D300 140 000 / D300 140 086 (XXL)
РЕЖУЩАЯ ПЕТЛЯ ПРЯМАЯ	D300 140 068	D300 140 001 / D300 140 087 (XXL)
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД НОЖ	D300 140 069	D300 140 002 / D300 140 088 (XXL)
КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД РОЛИК	D300 140 070	D300 140 003 / D300 140 089 (XXL)
ВАПОРИЗАЦИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД РОЛИК С НАСЕЧКОЙ	D300 140 091	D300 140 090 / D300 140 122 (XXL)

Принадлежности:.

Обтуратор
Quick lock
арт. D300 130 003 / D300 130 091 (XXL)

Трубка для стерилизации
Автоклавирование и хранение электродов
арт. D200 160 003 / D200 160 034 (XXL)

Стерилизационная корзина ReseCare
Автоклавируемая. 480x240x70 мм / 540x240x70 мм (XXL). С силиконовыми держателями
арт. D200 160 504 / D200 160 519 (XXL)

Биполярный кабель Erbe
VIO300D & VIO3
арт. D200 190 001

Биполярный кабель Covidien
ForceTriad
арт. D200 190 000



imaging all the women



ReseCare


Две модели
биполярного
резектоскопа 6 мм



Zone Athélia V - 390, Avenue du Mistral - 13600 La Ciotat - France
Tél : +33 (0) 9 51 51 30 30 - Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com



Данные медицинские изделия являются регулируемыми продуктами компании Delmont imaging. Они предназначены только для профессионального использования. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед использованием. Некоммерческое использование. Авторское право © 2021, SAS Delmont imaging, RCS Marseille B 817 710 411. Все права защищены. Никакая информация или часть этого документа не может быть воспроизведена или изменена в любой форме без предварительного разрешения Delmont imaging, REF D900 700 001 G RU 2022-01.

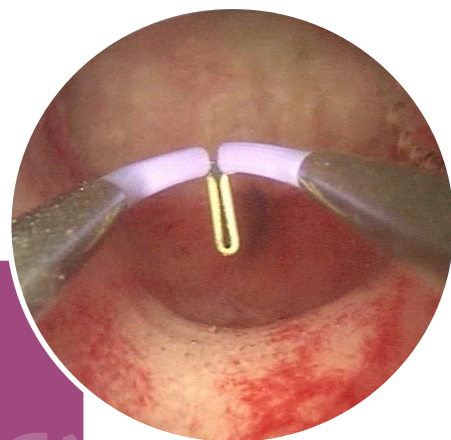

Уникальный резектоскоп 6 мм

Маленький, но эффективный!


Инструменты малого диаметра имеют многочисленные преимущества как для хирурга, так и для пациента.

ReseCare позволяет проводить точные и быстрые манипуляции. Отсеченные фрагменты имеют небольшие размеры, их присутствие не мешает обзору, работать гораздо комфортнее.

ReseCare не травмирует пациентов. Инструмент вводится без сопротивления, легкое введение даже у женщин в период менопаузы или со стенозом шейки матки. Как результат, уменьшается объем абсорбированной пациентом жидкости.

«После трех лет непрерывного использования, мы не перестаем восхищаться ReseCare! Он быстрый, простой и безопасный»


Профессор **Hervé Fernandez**, руководитель отделения OB/GYN Kremlin Bicêtre Hospital, Франция

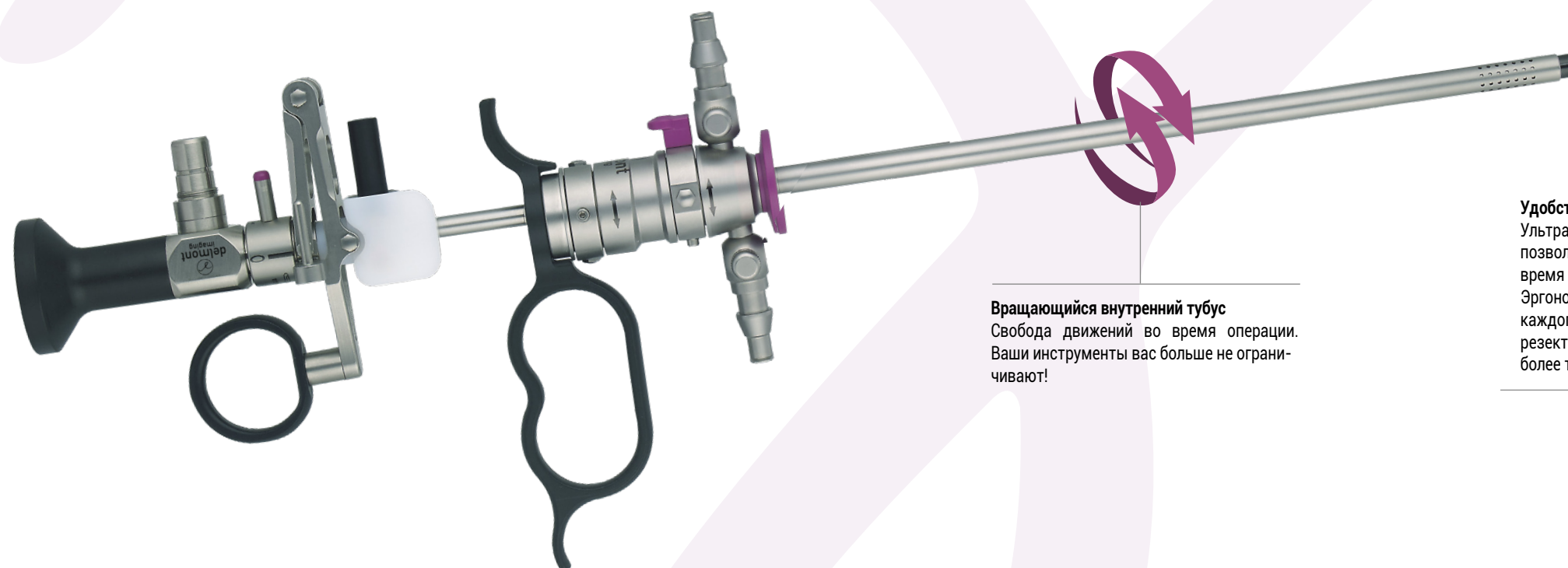

Вращающийся внутренний тубус
Свобода движений во время операции. Ваши инструменты вас больше не ограничивают!


Качество в каждой детали

Хорошее изображение это также результат эффективной аспирации-ирригации. Черный керамический наконечник устраняет блики.

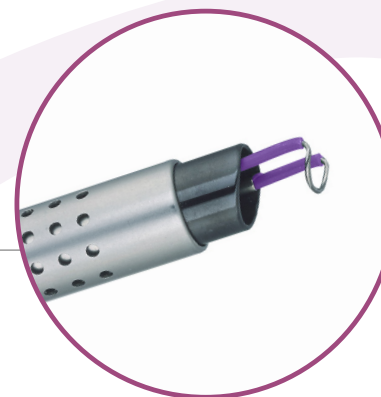

Быстросъемный замок

Больше никаких трудностей с замками.

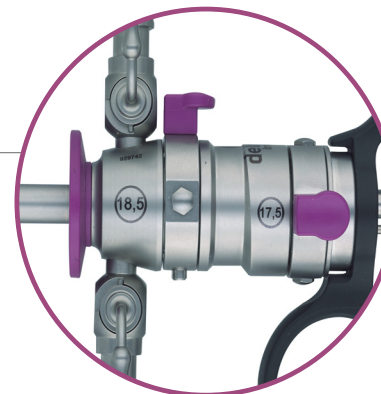

Удобство и точность



Ультралегкая рукоятка PEEK позволяет избежать усталости во время операции.

Эргономичное положение для каждого пальца. У вас лучше хват резектоскопа, а ваши движения более точные.



HD гистероскоп: непревзойденная производительность и долговечность

Новейшее поколение линз, разработанных для получения преимуществ HD, обеспечивает детализированные и идеально четкие изображения даже на заднем плане. Высочайшее разрешение и однородное распределение света обеспечивают огромную глубину резкости. Изображение полностью четкое! Наш HD гистероскоп автоклавируемый. Конструкция из трех отдельных трубок делает его прочным и долговечным, но, при этом, легко ремонтируемым в случае поломки.

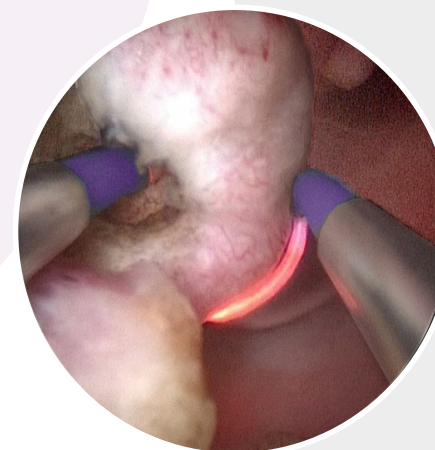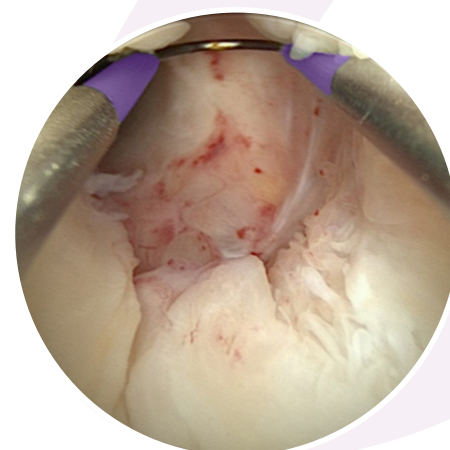


Биполярная резекция

Преимущество этой, широко используемой в настоящее время, технологии имеет два аспекта, связанных с безопасностью пациентов.

Во-первых, электрический ток больше не проходит через пациента, а напрямую возвращается к генератору через резектоскоп. Риск ожогов из-за диффузных токов и, как следствие, появление синехий из-за травмированного эндометрия значительно снижается.

Во-вторых, монополярный резектоскоп использует глицин, абсорбция которого является источником ионных нарушений, которые могут привести к летальному исходу. Вместо глицина биполярный резектоскоп использует солевой раствор, который не токсичен и, кроме того, дешевле.

ReseCare, подключенный к биполярному генератору, обеспечивает вам уверенность и спокойствие. Кроме того, данный резектоскоп **совместим** и отлично работает с любыми монополярными генераторами.

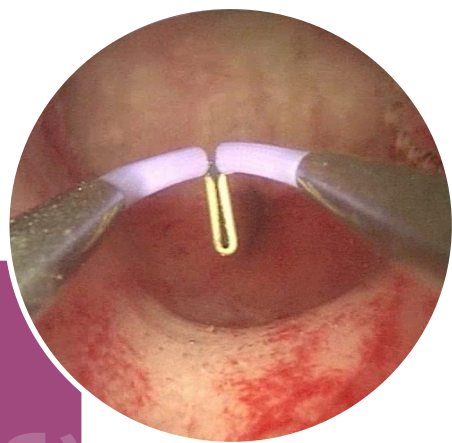


ReseCare XXL

Новейшая модель в линейке резектоскопов 6 мм!

ReseCare XXL имеет на 10 см большую рабочую длину в сравнении со стандартным ReseCare. Это позволяет оперировать пациентов с большой маткой или с избыточным весом. Ранее в таких случаях вы могли оперировать только вблизи шейки матки. Уникальная рабочая длина 287 мм обеспечивает легкий доступ ко всем полостям матки, включая устья и заднюю стенку. Стандартный резектоскоп в таких ситуациях просто не работает.

Этот новый продукт является идеальным решением, которое учитывает особенности любых женщин без ущерба для комфорта хирурга. Он удовлетворяет текущую потребность медицинских центров в особом оснащении, и такая потребность имеет тенденцию к увеличению.

+10
CM

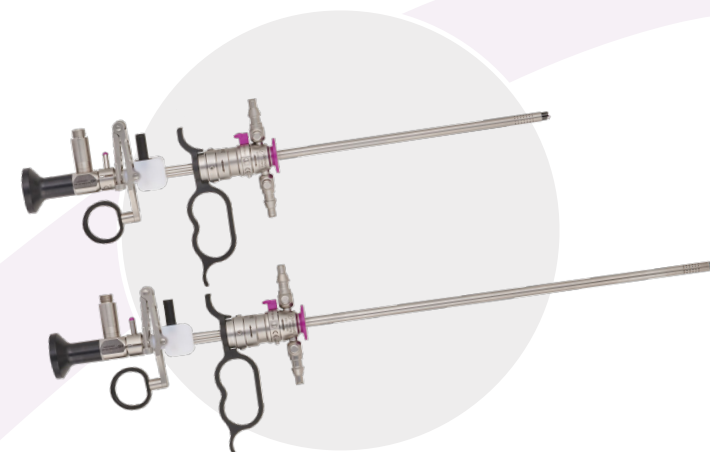

Диагностический набор также доступен в версии XXL


Как и в случае с ReseCare, диагностический набор XXL обеспечивает лучшую видимость крупных или труднодоступных полостей матки. Воспользуйтесь тем же качеством изображения высокой четкости для легкой диагностики. Длина и диаметр новых диагностических и операционных продуктов XXL удовлетворяют потребностям любых пациентов.



Новейшая технология для любых женщин

Всё то, что сделало ReseCare успешным продуктом, присутствует и в ReseCare XXL.

Малый диаметр 6 мм обеспечивает огромную подвижность и также снижает необходимость расширения шейки матки. HD гистероскоп обеспечивает четкое изображение всей полости матки с непревзойденным разрешением и однородным распределением света. Широкий выбор резекционных электродов позволяет проводить эффективное лечение патологий матки.

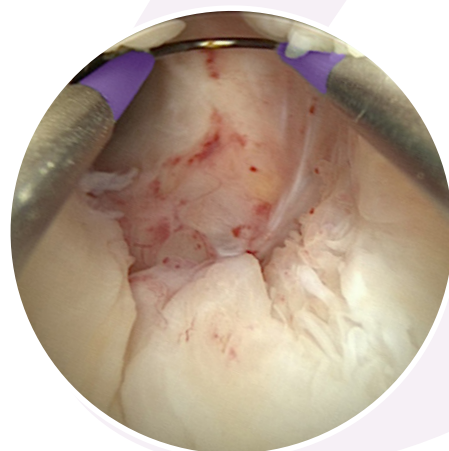

Диагностический набор:

HD гистероскоп, 2,9 мм, 30°

Автоклавируемый. Длина: 395 мм

арт. D300 100 088



Градуированный диагностический тубус, 4 мм

Версия XXL. Вращающийся ирригационный краник

арт. D300 110 072



Стерилизационная корзина для двух инструментов

Версия XXL. 480x150x50 мм. С силиконовыми держателями

арт. D200 160 520

