



*imaging all the women**



NOUVEAU
ICE
by RVF


La solución definitiva para
optimizar su práctica


delmont
imaging

Defina los nuevos estándares de la resección con **ICE**

¡La solución que tanto esperaba esta al alcance de su mano !

Diseñado específicamente para la ginecología, ICE (Innovative Chips Extractor) promete una acción rápida y atraumática para la extracción y recuperación de fragmentos de resección. Redefine los estándares de la resección histeroscópica ofreciendo una respuesta eficiente a una necesidad que, hasta ahora, no tenía una solución adecuada.

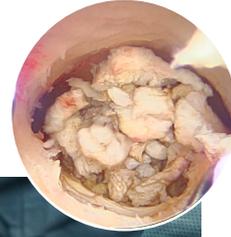

La innovación impulsada por una tecnología patentada

Creado en estrecha colaboración con expertos en ginecología, ICE ha sido diseñado por y para cirujanos especializados. Guiado por el profesor Fernandez, cuyas iniciales firman este producto, responde a exigencias de ergonomía, facilidad de uso y eficacia.

« Con tan solo dos presiones de la mano, la cavidad se vacía por completo eliminando tanto los fragmentos como la sangre, ofreciendo un ahorro de tiempo y una jornada quirúrgica optimizada. »

Pr. Hervé Fernandez

Hacer de la atención a sus pacientes una prioridad


La extracción de los fragmentos siempre ha sido una tarea tediosa y delicada. Las técnicas actuales presentan problemas importantes: el curetaje puede causar sinéquias, mientras que el uso del resectoscopio puede provocar laceraciones cervicales. ¡Estos métodos pronto pertenecerán al pasado!

Nuestra camisa interna ICE, conectada a su activador, es completamente compatible con las camisas externas de nuestros resectores ReseCare y MaxiCare. Esto permite mantener la camisa externa en su lugar, dentro del útero durante todo el procedimiento: la resección, la colocación del ICE y la extracción de los fragmentos.

¹ Schenker JG. Adhesiones intrauterinas: una evaluación actualizada. Fertil Steril. mayo de 1982;37(5):593-610.



Ensamble ICE a su camisa interna

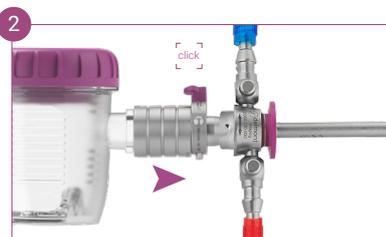

Conecte todo a la camisa externa.



Cierre el grifo y mueva la tubería de aspiración hacia la parte posterior del activador.

Referencias :

Activador ICE by RVF
Estéril. Uso único.
Entregado en paquetes de 5
Réf. D110 200 000

Camisa interna ICE by RVF
Para resectoscopios 26Fr.
Réf. D300 130 107

Camisa interna ICE by RVF
Para resectoscopios 18,5Fr.
Réf. D300 130 108