



*imaging all the women**



iFlow mini

Flujo continuo para una
irrigación sin problemas




Una bomba de irrigación de presión constante diseñada específicamente para la ginecología

Ya sea en ambulatorio o en quirófano, iFlow mini se adapta perfectamente a todas sus necesidades. Sus dimensiones compactas la convierten en un aliado ideal en espacios reducidos. En el quirófano, aproveche de una solución de irrigación completa, que incluye los dos programas esenciales de ginecología: histeroscopia y laparoscopia. Su facilidad de uso y sus prestaciones se mantienen intactas, lo que convierte a iFlow mini en un gran aliado en cualquier situación.



Una experiencia técnica al servicio de la calidad visual

iFlow mini se basa en una tecnología de irrigación simple y eficaz. Las bolsas de líquido se colocan en brazaletes a presión, los cuales se inflan automáticamente mediante la bomba para garantizar un flujo continuo y una presión constante, elementos esenciales para obtener una calidad de imagen óptima. Además, configure la altura de la paciente para una visualización fiable de la presión y así lograr una dilatación uterina que cumpla con sus expectativas.

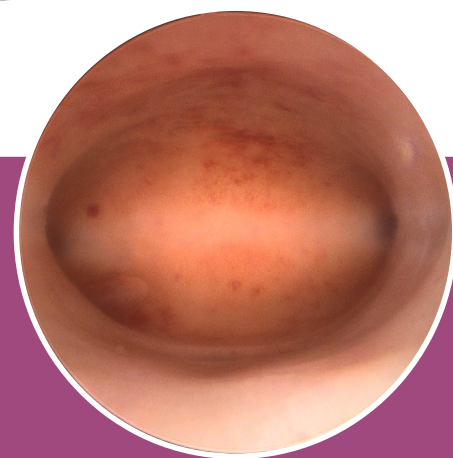


Soporte integrado al carrito
Cuelgue los brazaletes directamente y con facilidad en el soporte. ¡Ajuste su altura de manera sencilla según sus necesidades!

El adaptador en Y
El cambio de una bolsa de líquido a otra se realiza de forma fluida y sin esfuerzo, garantizando una intervención sin interrupciones.

Instalación sin esfuerzo del tubo
¡Conecte el tubo de irrigación con una sola mano en cuestión de segundos!

Una solución compacta y completa
Hemos diseñado nuestro carrito para que cubra todas sus necesidades en un espacio reducido, manteniendo una excelente estabilidad.

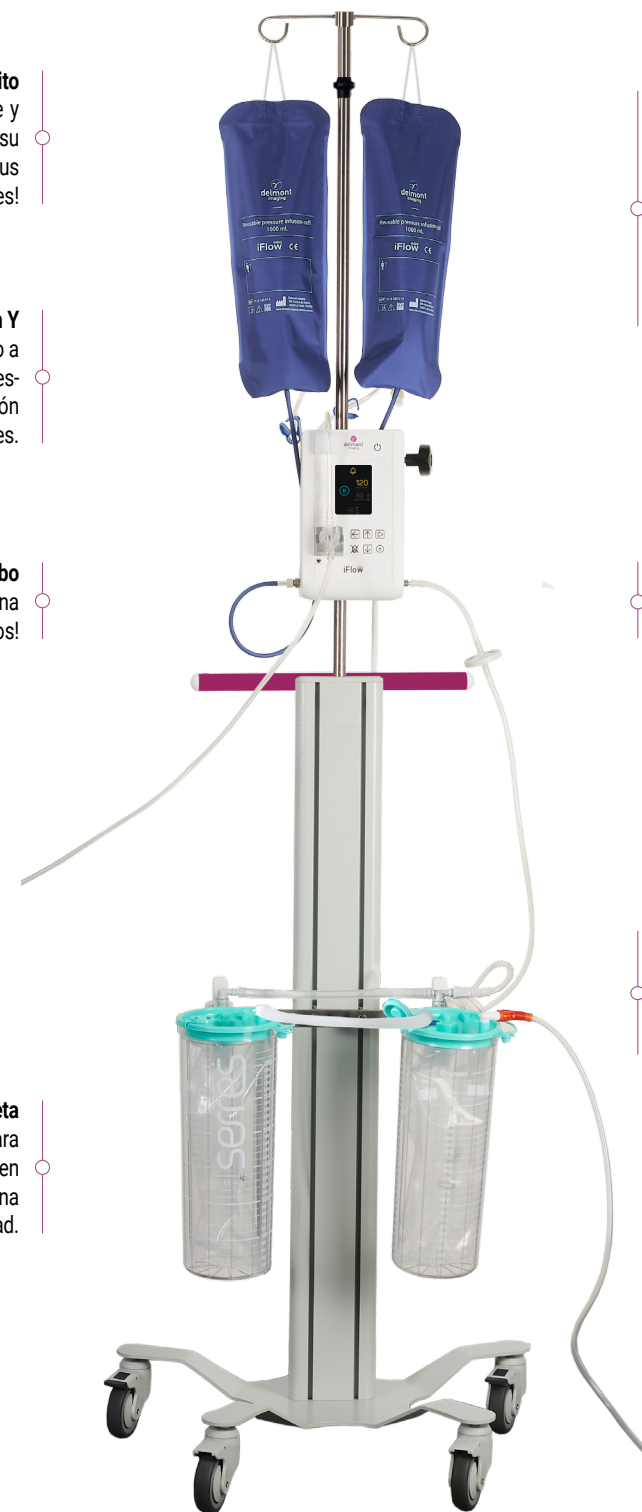

Programa de Histeroscopia
Ajuste su presión de consigna entre 60 y 200 mmHg, siendo este el único parámetro a configurar al inicio de la intervención. ¡Deje que iFlow mini se encargue del resto!

Programa de Laparoscopia
¡Disfrute de un caudal que puede alcanzar hasta 1 L/min!

Aspiración al vacío disponible
Ajuste la potencia de aspiración en dos niveles, con un máximo de 2 L/min.

Un riel para contenedores incluido
Coloque hasta cuatro contenedores de recuperación simultáneamente en el carrito y optimice así del espacio en su sala.

La solución de confianza para sus histeroscopias

Dado que la presión intrauterina es un factor clave en la histeroscopia, nuestro sensor de presión realiza mediciones precisas. Monitoree fácilmente en cualquier momento la presión ejercida sobre las bolsas de líquido desde nuestra interfaz. Además, diferentes tipos de alarmas están disponibles para alertar al equipo médico sobre una posible sobrepresión y advertir sobre su nivel de criticidad.

Referencias y características de iFlow mini :

iFlow mini. Bomba de irrigación. Histeroscopia y Laparoscopia

Programa de Histeroscopia incluido :

- Presión objetivo ajustable : 60 a 150 mmHg o 60 a 200 mmHg
- Rango de presión medido : 60 a 225 mmHg $\pm$ 15 mmHg

Potencia máxima de aspiración : 50 kPa

Alimentación eléctrica : (100-230 V~; 50/60 Hz)

Consumo eléctrico : 1 350 VA

Dimensiones : 185 x 230 x 130 mm

Peso : 2,0 kg

Grado de protección : Tipo CF



Set completo que incluye :

- iFlow mini. Bomba de irrigación únicamente
- 2 x Brazaletes a presión (modelo a elegir)
- Adaptador en Y para conexión doble de brazaletes
- Tubulatura auto-test para el sensor de presión iFlow mini

Réf. D400 100 600

Bomba de irrigación únicamente

Réf. 110 100 012

Mango de presión :

Mango 3L.
275 x 465 mm

Réf. D110 100 020

Mango 3L. Versión alargado.
275 x 535 mm

Réf. D110 100 013

Mango 1L.
160 x 415 mm

Réf. D110 100 014

Tubuladuras :



ESTERIL. Tubo de irrigación

A uso unico. 2 percutores.

Acondicionamiento del embalaje: 15

Réf. D110 100 016



ESTERIL. Tubo de aspiración

A uso unico. 2 conectores.

Acondicionamiento del embalaje: 15

Réf. D110 100 022




Tubo de aspiración al vacío

Con filtro. No esterilizado.

Para 30 días de uso

Réf. D110 100 017

Carro :

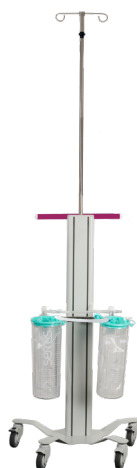

Carrito completo iFlow mini, sin estantería, que incluye :

- 2 x Soportes para contenedores Serres con fijación en riel
- 2 x Contenedores de recuperación Serres 3L – sin tapa
- 2 x Bolsas de aspiración Serres con tapa, de un solo uso
- Válvula en T para conexión en serie de los contenedores Serres
- Tubulatura de aspiración en tándem para contenedores Serres, de un solo uso
- Tubulatura al vacío en tándem para conexión en serie de los contenedores Serres

Réf. D200 100 503