



*imaging all the women**



NOUVEAU
ICE
by RVF

La solution ultime pour
optimiser votre pratique


delmont
imaging

Définissez les nouveaux standards de la résection avec



La solution que vous attendiez tant à portée de main !

Spécialement conçu pour la gynécologie, ICE (Innovative Chips Extractor) promet une action rapide et atraumatique pour l'extraction et la récupération de copeaux de résection. Il redéfinit les standards de la résection hystéroscopique en apportant une réponse efficace à un besoin qui, jusqu'à présent, restait sans solution adaptée.



L'innovation propulsée par une technologie brevetée

Créé en étroite collaboration avec des experts en gynécologie, ICE a été pensé par et pour des chirurgiens spécialisés. Guidé par le professeur Fernandez, dont les initiales signent ce produit, il répond à des exigences d'ergonomie, de facilité d'utilisation et d'efficacité.

« En seulement deux pressions de la main, la cavité est entièrement vidée des copeaux mais aussi du sang, offrant un gain de temps et une journée opératoire optimisée. »
Pr. Hervé Fernandez

Faire de la prise en charge de vos patientes une priorité


L'extraction des copeaux a toujours été une tâche fastidieuse et délicate. Les techniques actuelles présentent toutes des problèmes majeurs : la curette peut entraîner des synéchies¹ tandis que l'utilisation du résecteur lui-même peut causer des lacérations cervicales. Ces méthodes appartiendront bientôt au passé !

Notre chemise interne ICE, connectée à son activateur, est entièrement compatible avec les chemises externes de nos résecteurs ReseCare et MaxiCare. Cela permet de conserver la chemise externe en place à l'intérieur de l'utérus tout au long de la procédure : la résection, la mise en place de ICE et l'extraction des copeaux !

¹ Schenker JG. Intrauterine adhesions: an updated appraisal. Fertil Steril. mai 1982;37(5):593-610



1 Assemblez ICE à sa chemise interne

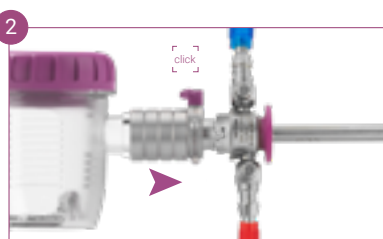

2 Connectez le tout à la chemise externe



3 Fermez le robinet et déplacez la tubulure d'aspiration à l'arrière de l'activateur

Références :


Activateur ICE by RVF
Stérile. Usage unique. Livré par 5
Réf. D110 200 000

Chemise interne ICE by RVF
Pour résecteurs 26Fr.
Réf. D300 130 107

Chemise interne ICE by RVF
Pour résecteurs 18,5Fr.
Réf. D300 130 108



Zone Athélia IV - 297, Avenue du Mistral - 13600 La Ciotat - France
Tél : +33 (0) 9 51 51 30 30 - Fax : +33 (0) 9 57 51 31 00
www.delmont-imaging.com - contact@delmont-imaging.com

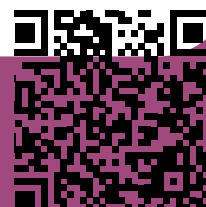

* Imagez toutes les femmes

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE 1304. Ils sont fabriqués par Delmont Imaging. Ils sont destinés à un usage professionnel uniquement. Lisez attentivement la notice avant utilisation. Ce document n'a pas vocation à remplacer la notice d'utilisation.

Document non contractuel. SAS Delmont Imaging, RCS MARSEILLE 817 710 411. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou modifiée sans l'autorisation préalable de Delmont Imaging. REF D900 700 241 A FR 2025-10.