

Check-list avant utilisation

- 1 Hystéroscope 2,9mm
- 2 Élément de travail passif ou actif
- 3 Chemise interne 17,5Fr.
- 4 Chemise externe 18,5Fr.
- 5 Électrodes de résection
- 6 Câble de lumière
- 7 Caméra d'endoscopie
- 8 Câble de résection
- 9 Tube d'irrigation
- 10 Tube d'aspiration

Quick-start ReseCare




1 Insérer l'hystéroscope dans l'élément de travail.




2 Le "0" de l'élément de travail doit être orienté vers le haut et positionné face à la connectique lumière.




3 Tourner la baïonnette pour verrouiller la connexion.

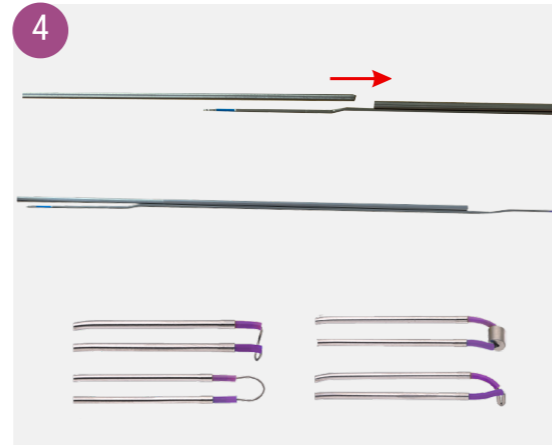


4 Choisir d'électrode adéquate et insérer la partie distale de l'hystéroscope dans le tube de l'électrode.

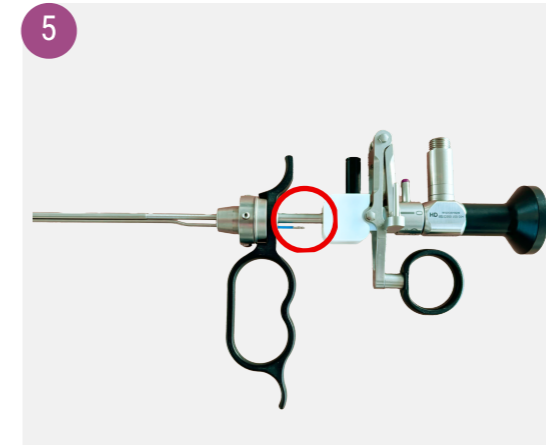


5 Insérer l'électrode dans le trou dédié de l'élément de travail jusqu'à atteindre le bloc blanc, puis pousser jusqu'à entendre un clic de verrouillage.

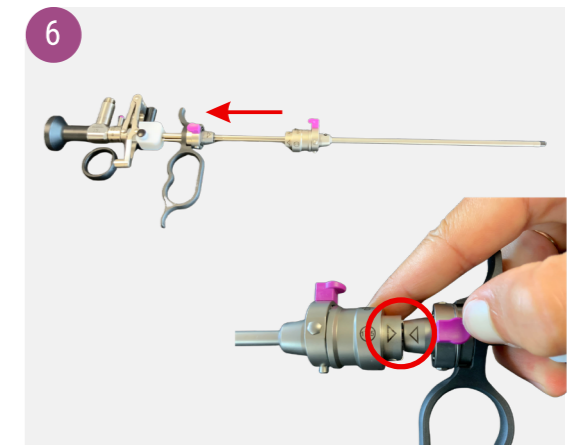


6 Insérer ensuite la chemise interne. Aligner les deux flèches puis pousser jusqu'à entendre un clic de verrouillage pour connecter les deux éléments.

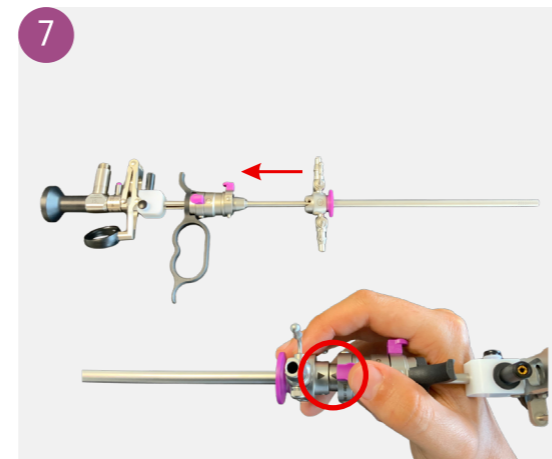

7 Insérer enfin la chemise externe en alignant les deux flèches puis pousser jusqu'à entendre un clic de verrouillage.

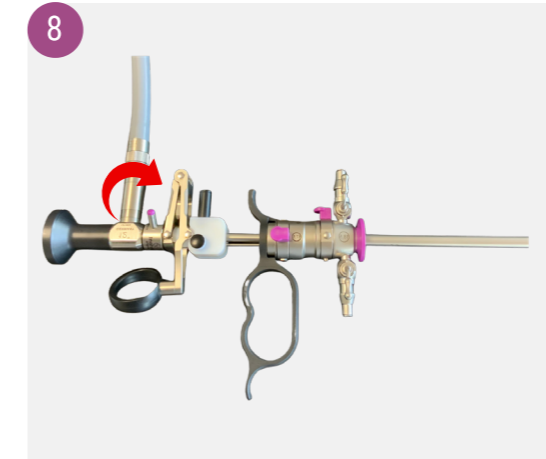


8 Connecter le câble de lumière en le vissant au connecteur dédié de l'hystéroscope.

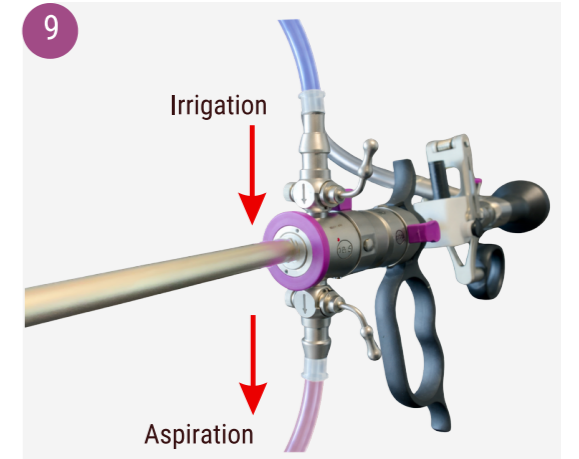


9 Connecter les tubes d'irrigation et d'aspiration sur les robinets dédiés de l'hystéroscope.


Quick-start ReseCare

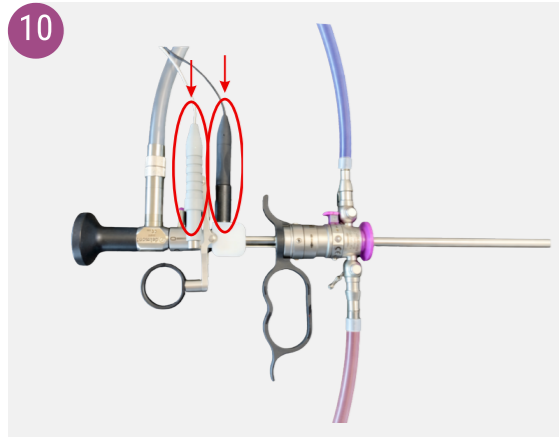


10
Connecter les deux embouts du câble bipolaire (chaque connecteur a un diamètre différent).

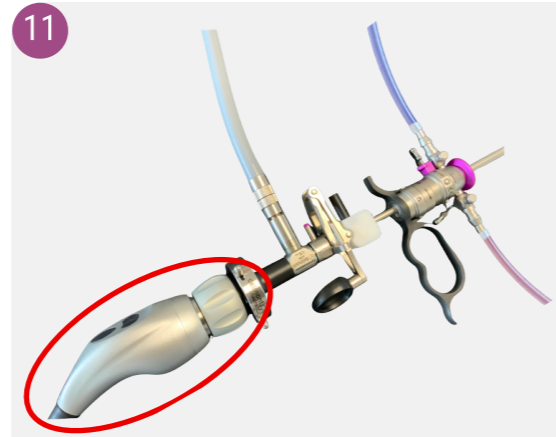


11
Enfin connecter la caméra d'endoscopie sur la bonette de l'hystéroscope.

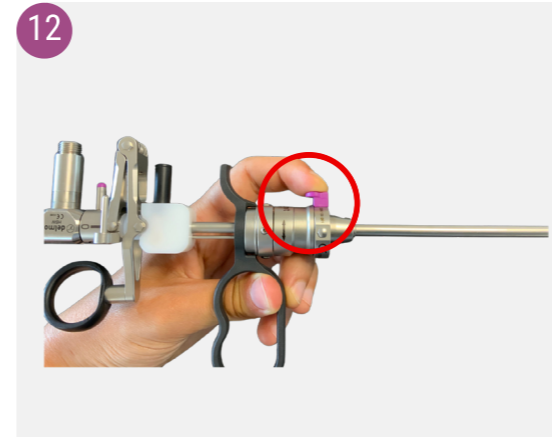

12
Pour le désassemblage, après avoir déconnecté tous les produits annexes à ReseCare, retirer la chemise externe en appuyant sur le bouton Quick-lock .

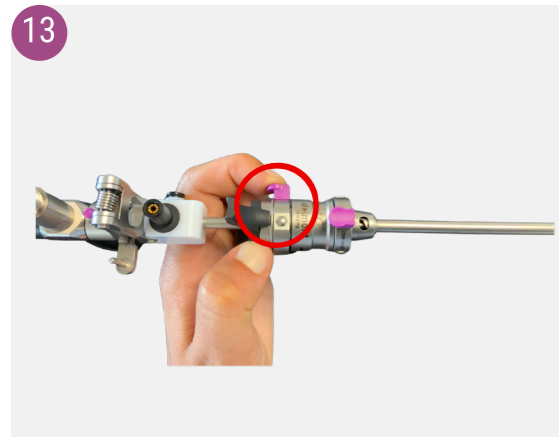

13
Déconnecter la chemise interne en appuyant sur le second bouton Quick-lock.

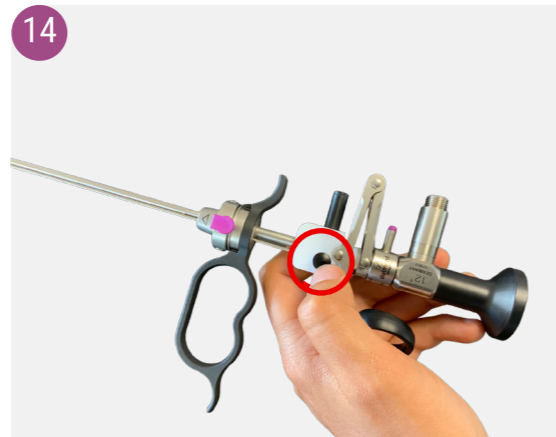

14
Retirer l'électrode de résection en appuyant sur le bouton poussoir noir de l'élément de travail.



15
Ouvrir la baïonnette en la tournant et retirer l'hystéroscope. Le faire glisser en le maintenant bien droit jusqu'à son retrait complet.



delmont
imaging

Scanner ce QR code pour découvrir la vidéo d'utilisation :



297 avenue du Mistral
13600 La Ciotat, FRANCE



contact@delmont-imaging.com



+33 (0)9 51 51 30 30



www.delmont-imaging.com